

SÅRBEHANDLING
INTENSIVPLEJE
STOMIPLEJE
UROLOGI
OPERATION
FIXATION

FLEXI-TRAK™

Til fiksering af katetre og dræn



FLEXI-TRAK™ har et bredt anvendelsesområde og sikrer en sikker fiksering af katetre og dræn som f.eks. urinkatetre, ventrikel- og duodenalsonder, rektalsonder, nefrostomikatetre, dialysekatetre og thoraxdræn m.m. FLEXI-TRAK™ kan åbnes og lukkes flere gange, hvilket betyder, at man kan ændre position på et kateter, uden at fikseringen skal skiftes.




ConvaTec

Realise the possibilities™

FLEXI-TRAK™

SIKKER OG FLEKSIBEL FIKSERING

FLEXI-TRAK™ giver en sikker og fleksibel fiksering af katetre og dræn

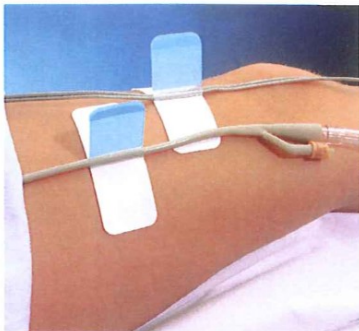

SÅDAN ANVENDER DU FLEXI-TRAK™




Huden skal være ren og tør før applicering.




Fjern det hvide beskyttelsespapir på bagsiden af FLEXI-TRAK™.




Applicér FLEXI-TRAK™ på det ønskede sted.

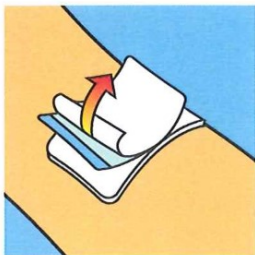

Fjern det trykte beskyttelsespapir på oversiden af FLEXI-TRAK™.

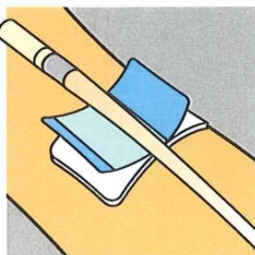

Placér kateteret/drænet langs midten mellem de to vinger.

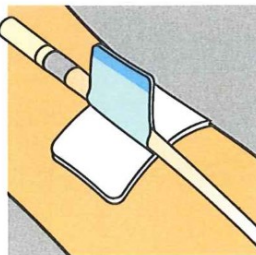

Fold de to vinger mod hinanden og form dem efter kateterslangen/drænslangen, så de hæfter mod kateter- eller drænslangen. Når FLEXI-TRAK™ skal fjernes, begynd med at løsne kanten af fikseringen og fjern forsigtigt FLEXI-TRAK™, mens du anbringer et svagt tryk på den omgivende hud.

FLEXI-TRAK™ Large

Størrelse
100 x 38 mm

Stk./æske
50

Varenummer
37449



FAKTA

FLEXI-TRAK™ består af en plade af polyurethanskum, som er belagt med en hudvenlig polyacrylat-klæber. Selve fikseringen af katetret består af to "vinger", som er belagt med en specialklæber, som gør, at vingerne kan åbnes og lukkes mange gange. FLEXI-TRAK™ egner sig bedst til katetre og dræn med en diameter mellem CH 8 – 36. FLEXI-TRAK™ skal anvendes på intakt hud. FLEXI-TRAK™ kan sidde i op til 5 døgn. FLEXI-TRAK™ kan ikke benyttes af patienter med kendt allergi for polyacrylat.

OPBEVARING

Opbevares tørt ved rumtemperatur. Må ikke udsættes for kulde og høj luftfugtighed.

HOLDBARHED

5 år fra produktionsdatoen.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i pakken.



ConvaTec

Realise the possibilities™

ConvaTec Denmark Aps
Birkerød Kongevej 2
3460 Birkerød
Tlf.: 48 16 74 74
Fax: 48 16 70 45
www.convatec.com
convatec.danmark@convatec.dk