

# Uro-Tainer®

## Skyllemiddel til permanente urinkatetre

### Indikation

- Tilstopning af permanente top- og blærekatetre pga. bakterielle inkrustationer / forkalkninger på kateteret

### Egenskaber

- Virker profylaktisk mod tilstopning af kateteret. Opløser begyndende inkrustationer
- Oprenser effektivt katetret og forlænger dermed levetiden og giver dermed færre kateterskift
- Ved gener (smerter/blødning) ifm skiftning af et kateter, kan Solutio R benyttes x 1 på dagen

### Produktbeskrivelse

- Suby G (Citronsyre 3,23%) anbefales som profylaktisk skyllemiddel, hvis patienten er defineret som 'blokker'
- Solutio R (Citronsyre 6%) anbefales i de tilfælde, hvor kateteret ofte stopper til samt i forbindelse med kateterskift
- Lukket, sterilt og sikkert system
- Økonomisk i brug
- Alt-i-en løsning:
- Samme pose til skylning og opsamling
- Ingen overflødige dele eller unødvendige procedurer
- Ingen risiko for kontaminering

### Inkrustationer

- Skyldes at bakterier i urinen producerer enzymet Urease. Dette øger urinens PH-værdi, der medfører en udfældning af magnesium og calcium salte. Dette betyder kalkbelægninger / inkrustationer på kateteret og dermed stop af dette.

### Brugsvejledning

1. Opvarm evt. Uro-Tainer® i lunkent vand
2. Fjern den yderste indpakning og tag Uro-Tainer® ud
3. Luk Uro-Tainer® ved at føre klemmen hen over slangen
4. Træk i tappen for at fjerne låget. Skru låget løs og fjern det uden at berøre den sterile konektor
5. Uro-Tainer® posen kobles til kateteret, og klemmen åbnes
6. Lad opløsningen løbe så meget ind som muligt uden at klemme på posen - måske er det kun 1/3 pose. Efter indløb lukkes klemmen, og systemet efterlades samlet i 5 min. Afbryd ikke forbindelsen mellem posen og kateteret
7. Åbn klemmen og hold posen under blæreniveau for at tillade den brugte opløsning at løbe tilbage i Uro-Tainer® posen. Når posen er fuld, lukkes klemmen, og posen fjernes fra kateteret. Urinposen tilsluttes, og Uro-Tainer® posen kasseres efter brug. Må gerne udtømmes i toilet

### OBS!

- Instillation med Solutio R kan i få tilfælde give en let svie. Der kan evt. efterskylles med NaCl.
- Hold pause med Uro-Tainer®, hvis og mens der behandles for en blærebetændelse

### Forslag til brug af Uro-Tainer®, Solutio R 6% eller Suby G 3,23%

#### Følg altid de lokale instrukser – hvis disse ikke findes da

- **Ved kateterstop efter 1, 2 eller 3 uger**
  - Hver eller hver 2. dag med Solutio R i minimum 2 uger
  - Herefter forsøges yderligere nedsættelse til x 2 – 3 gange ugentlig
  - Overgå evt. til Suby G
- **Ved kateterstop hver 4. uge eller sjældnere**
  - Starte med x 2 gange ugentlig med Suby G
- **Ved smerter ved kateterskiftning grundet inkrustationer**
  - Anvend Solutio R samme dag eller dagen før skiftning



Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske	Salgsenhed pr. karton
301019 (FB99839)	Uro-Tainer® Suby G 100 ml, 3,2% citronsyre	10 stk.	60 stk.
301020 (FB99841)	Uro-Tainer® Solutio R 100 ml, 6% citronsyre	10 stk.	60 stk.