

# Uro-Tainer® Mono

Til forebyggelse og bekæmpelse af inkrustationer i/på permanente katetre

## Indikation

- Tilstopning af permanente top- og blærekatetre pga. bakterielle inkrustationer/forkalkninger i og på katetret

## Egenskaber

- Virker profylaktisk mod tilstopning af katetret
- Forlænger katetrets levetid
- Færre kateterskift og mindre risiko for kontaminering
- Minimerer traumer og smerter ved fjernelse af katetret
- Er steril og klart til brug

## Produktbeskrivelse

- PVC-frit lukket, sterilt og sikkert system
- Suby G (citronsyre 3,23 %) anbefales som profylaktisk hjælpemiddel, hvis patienten er defineret som 'blokker'\*
- Solutio R (citronsyre 6 %) anbefales, hvor der trods brug af Suby G forsat er stop af katetret
- Solutio R kan benyttes i forbindelse med kateterskift
- De to opløsninger kan kombineres

## Inkrustationer

- Skyldes at bakterier i urinen, oftest bakterien proteus, producerer enzymet urease. Dette øger urinens pH-værdi, hvilket medfører en udfældning af magnesium- og calciumsalte. Det betyder kalkbelægninger/ inkrustationer i og på katetret og dermed stop af dette.

\* 'Blokker' = to eller flere tilstoppede katetre over 6 uger

Uro-Tainer® er en nødvendig forudsætning for at sikre en optimal funktion af katetret



Nyhed nu  
PVC-fri

## Skyleregime

Ved kateterstop hver/hver anden uge

Uro-Tainer® Suby G: 3-5 gange ugentligt i 2 uger.

Hvis kateterurinen herefter løber, som den skal, kan skyllefrekvensen eventuelt sættes ned.

Hvis der fortsat er kateterstop pga. inkrustationer, sættes skyllefrekvensen op. Alternativt skylles med Uro-Tainer® Mono Solution R i stedet for.

Følg altid de lokale instrukser. Kontakt evt. kontinenssygeplejersken.

## Brugsvejledning

Se bagsiden af dette datablad eller gå ind på B. Brauns danske hjemmeside for at se to videoer, der gennemgår den praktiske håndtering samt den teoretiske viden om Uro-Tainer®.

[www.bbraun.dk](http://www.bbraun.dk) urologi/inkontinens, skyllevæsker og så Uro-Tainer® Twin

## OBS!

- Instillation med Solutio R kan i få tilfælde give en let svien. Der kan evt. efterskylles med NaCl.
- Hold pause med Uro-Tainer®, hvis og mens der behandles for en blærebetændelse.


| Varenr.  | Produktnavn                                   | Salgsenhed pr. æske | Salgsenhed pr. karton |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| FB99839  | Uro-Tainer® Suby G, 100 ml, 3,23 % citronsyre | 10 stk.             | 60 stk.               |
| FB99841* | Uro-Tainer® Solutio R 100 ml, 6 % citronsyre  | 10 stk.             | 60 stk.               |

\* PVC-fri leveres i løbet af 1. kvartal 2016

# Uro-Tainer® Mono

## Til vedligeholdelse af permanente urinkatetre

---

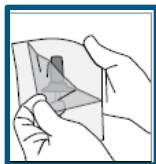

1. Åbn yderpakningen og tag Uro-Tainer® ud.



2. Luk Uro-Tainer® slangen med plastikklemmen.



3. Fjern forseglingen.



4. Drej og træk hættten af uden at røre den sterile konnektor. Åbn for plastikklemmen og tillad få dråber af væsken at løbe op i slangen for at fjerne evt. luftbobler i denne . Luk klemmen igen.



5. Indfør konnektoren i kateteret.



6. Hold Uro-Tainer® over blæreniveau, åbn plastikklemmen og lad væsken løbe ind gennem kateteret. For at undgå gener i blæren, tving eller pres ikke væsken ind, lad i stedet væsken løbe ind med tyngdekraftens hjælp. Luk plastikklemmen efter indløb for at blokere for tilbageløb.



7. Efter 5 minutters virketid åbnes plastikklemmen, posen holdes under blæreniveau, så væsken kan løbe tilbage i posen.



8. Sørg for at plastikklemmen er lukket. Fjern konnektoren fra katetret ved at dreje den forsigtigt rundt. Forbind kateteret til en steril drænpose. Smid Uro-Tainer® posen ud og vask hænderne.

Må ikke genanvendes. Uro-Tainer® er kun til engangsbrug. Kasseres korrekt efter brug.