


BRUGSANVISNING - KANYLEBEHOLDERE

Undgå stikulykker. Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden brug af kanylebeholderen.

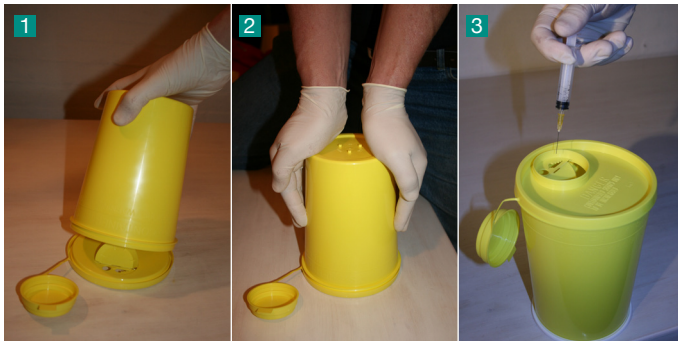

INDEN BRUG

- 1 Anbring låget med toppen nedad på et fast underlag - f.eks. et bord. Placer spanden med bunden opad i låget.
- 2 Pres med hele kroppens vægt spanden ned i låget, indtil der lyder et klik.
- 3 Nu er beholderen klar til brug. Er kanylebeholderen fastspændt i den særlige borddisk, er det endnu lettere at foretage hele processen med én hånd.



UNDER BRUG

- 4 Låget er designet til bortskaffelse af tre typer farligt affald: Kanyler, Insulinpenne, Skalpeller og andre skarpe genstande. Det er vigtigt at benytte det korrekte hul til de nævnte tre typer.

Bortskaffelse af redskaber:

Kanyler: Kanylehovedet fastholdes i aftrækssporet. Træk sprøjten opad. Kanylen frigøres og falder ned i beholderen.

Insulinpenne: Indsæt nålehovedet ved hullets største åbning og skub pennen mod den smallere ende. Når nålehovedet er fastklemmt, drejes insulinpennen, indtil skaflet er fri af nålehovedet. Et let skub med pennen presser nålen ned i beholderen.

Skalpeller/skarpe genstande: Dumpes i det store hul.

- 5 **Vendbart "flap-låg":**

Det lille, vendbare låg med stroppen har to funktioner: A: Midlertidig lukning - B: Permanent lukning. Er beholderen i brug, anvendes den midlertidige lukning ("A" på låget opad). Er beholderen fyldt, anvendes den permanente lukning ("B" på låget opad).

OBS! Fyld aldrig over den markerede fyldlinje.



EFTER BRUG

- 6 Permanent lukning: Det vendbare "flap-låg" (med "B" på låget opad) presses fast over åbningen. Herefter kan låget ikke åbnes igen. Beholderen er nu forseglet og klar til destruktion iflg. institutionens anvisninger.

Bemærk: Sikkerhedsbeholderen fås med rødt låg til opsamling af medicinrester og med blått låg til kviksvovlsaffald. - Se mere på www.uson.dk



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001.

04:10