

DA SPYCRA® Roll



Transparent film med silikoneklæb

Spycra Roll: Usteril transparent polyuretanfilm med silikoneklæb udviklet med "ReSkin Silicone Skin Technology" – en unik patenteret klæbeteknologi.

Produktbeskrivelse:

Spycra Roll er en gennemsigtig tynd polyurethanfilm med en blød, selvklæbende silikoneoverflade designet til at beskytte skrøbelig og sårbar hud.

Spycra Roll minimerer risikoen for hudskader.

Spycra Roll er meget formbar og tilpasser sig forskellige overfladestrukturer og kropskonturer. Den giver et fleksibelt, gennemsigtigt dække, der beskytter patientens hud eller sår mod mikrobiel kontaminering, gennemtrængning af væske eller anden ekstern kontaminering.

Spycra Roll er åndbar og understøtter sårheling baseret på principperne om fugtig sårheling.

Spycra Roll er ikke-absorberende.

Spycra Roll kan bruges som en selvstændig forbindelse eller i kombination med andre produkter.

Spycra Roll kan klippes i passende størrelse og er derfor en perfekt løsning til at beskyttelse af små eller større hudområder.

ReSkin Silicone Skin Technology

"ReSkin Silicone Skin Technology" er en patenteret kombination af elastiske fibre og et blødt, selvklæbende silikoneoverlag på den ene side af bandagen.

"ReSkin Silicone Skin Technology" er integreret i Spycra Roll, en elastisk polyurethanfilm, der ikke klæber til såret og sikrer minimal traume og smerte ved fjernelse af bandagen.

Når den anvendes på (skrøbelig) hud, sikrer Spycra Roll en blød og perfekt tilhæftning på huden, samt atraumatisk og smertefri skift af forbindningen.

I kraft af "ReSkin Silicone Skin Technology" kan Spycra Roll anvendes beskyttende på meget skrøbelig og sårbar hud.

Spycra Roll kan anvendes på overfladiske ikke til ringe væskende sår, hvor den sikrer høj bærekraft, smertefri fjernelse af bandagen og optimal støtte af sårhelingsprocessen.

Formål for anvendelse

Spycra Roll er designet til at beskytte skrøbelig og sårbar hud.

Spycra Roll minimerer risikoen for hudskader.

Spycra Roll er meget formbar og tilpasser sig forskellige overfladestrukturer og kropskonturer. Den giver et fleksibelt, gennemsigtigt dække, der beskytter patientens hud eller sår mod mikrobiel kontaminering, gennemtrængning af væske eller anden ekstern kontaminering.

Spycra Roll er åndbar og understøtter sårheling baseret på principperne om fugtig sårheling.

Anvendelse

- som en primær forbindelse på skrøbelig og sårbar hud for at minimere hudskader.

- som en beskyttende film til at beskytte hud eller sår mod mikrobiel eller anden forurening samt væskegennemtrængning.

- som sekundær forbindelse, til fiksering af gaze eller nonwoven kompresser.

Brugsanvisning

1. Vask dine hænder inden sårbehandling / pleje
2. Rengør huden eller såret omhyggeligt, og tør huden grundigt
3. Påfør om nødvendigt et absorberende kompres/bandage
4. Klip en størrelse, der er stor nok til at dække hele det hudområde, der skal beskyttes. I tilfælde af et sår, der dækkes af bandage, skal du klippe en størrelse, der går min. 2 cm udover bandagen
5. Hold Spycra Roll med det beskyttende gennemsigtige lag opad og fjern beskyttelseslaget
6. Hold den gennemsigtige film ved de to grønne kantbeskyttelser og påsæt Spycra filmen på den skrøbelige hud, glat forsigtigt Spycra filmen på plads for at sikre en god tilhæftning
7. Fjern (afriv) de grønne kantbeskyttere, og glat igen forsigtigt Spycra filmen for at sikre en god tilhæftning.

Bemærk:

Sørg for, at Spycra Roll påføres i ustrakt tilstand.

Hvor det er klinisk indiceret, kan cremer og salver indeholdende steroider eller antimikrobielle stoffer, eller hydrogeler, påføres under Spycra Roll.

Ved påføring af hydrogel, creme eller salve under Spycra Roll kan klæbeevnen blive kompromitteret.

Fjernelse af Spycra Roll

Løft et hjørne af filmen, og træk forsigtigt filmen af.

Forholdsregler

- Fugtig hud eller kraftig svedtendens vil mindske tilhæftningen af Spycra Roll.
- Inden påsætning skal huden være helt tør.
- Spycra Roll må ikke anvendes som primær bandage på åbne sår.
- Ved bad skal det sikres, at Spycra Roll ikke kommer i kontakt med vand.

Advarsler:

- Spycra Roll bør ikke bruges som en primær fiksering af IV-kanyler, kanyler, porte eller andre infusions eller dræn-systemer.

Spycra Roll er baseret på den af Reskin Medical N.V. udviklet 'ReSkin Silicone Skin Technology'



Reskin Medical NV, Poort West Limburg 1399; Industrieweg 114 B-3980 Tessenderlo, Belgium
-T: +32 (0)13 67 13 67, F: +32 (0)13 67 13 68

Version 1 - Printed 2020-11

