



hCG Cassette Combo

Kort brugsvejledning

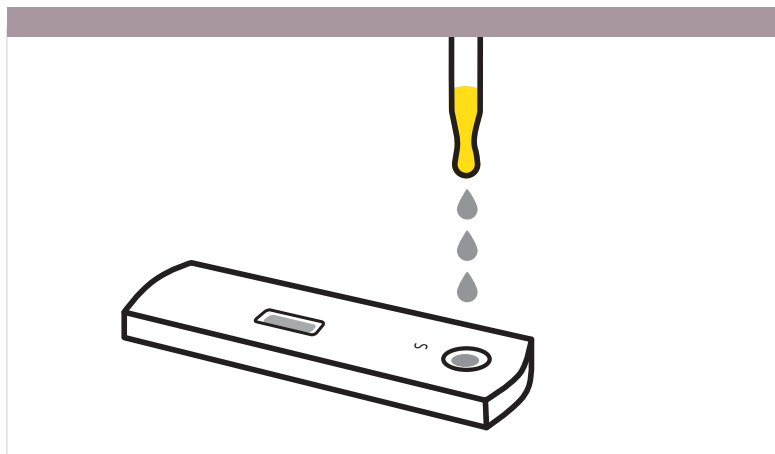

- 1 Tilsæt 3 dråber prøve (urin, serum eller plasma) i kassetts prøvefordybning. Start tidstagningen. Aflæs resultatet, når der er gået 5 minutter. Resultatet skal fortolkes inden for 10 minutter.

Tolkning af resultaterne

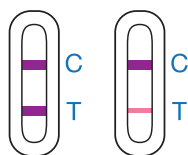


Positivt resultat

Der fremkommer to tydelige farvede streger. Den ene streg skal være i området til kontrolstregen (C) og den anden i området til teststregen (T).



Negativt resultat

Én farvet streg fremkommer i området til kontrolstregen (C). I området til teststregen (T) vil ingen farvet streg være synlig.

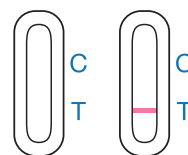

Ugyldigt resultat

Kontrolstregen (C) fremkommer ikke. Utilstrækkelig prøvemængde eller ukorrekte procedureteknikker er de mest sandsynlige årsager til manglende kontrolstreger.

Sikkerhedsforskrifter

- » Udelukkende til professionel diagnostisk brug in vitro
- » Må ikke anvendes efter udløbsdatoen
- » Testen skal forblive i den forseglede pose, indtil den skal bruges

Indsamling og håndtering af prøver

- » Biosynex hCG Cassette Combo er beregnet til brug med humane urin-, serum- og plasmaprøver.
- » Udfør testen med det samme efter prøvetagningen. Prøver kan opbevares ved 2–8 °C i op til 48 timer. Hvis prøverne skal opbevares i længere tid, skal de opbevares nedfrosset. Bring prøverne til stuetemperatur, inden testen udføres.



Orion Diagnostica Oy / Danmark
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark
Tlf. 8614 0000, Fax 8614 0001
www.oriondiagnostica.dk

8074-01DK, 09/2016.

Produkt	Varenr.
Biosynex hCG Cassette Combo, 20 test	148919

*Læs venligst brugsvejledningen,
inden testen udføres.*