


eakin freeseal®

eakin freeseal® tætningsringe er fugtabsorberende hudbeskyttende ringe, som beskytter huden omkring en stomi eller et sår imod hudbeskadigende og aggressive kropsvæsker. Høj klæbeevne på begge sider sikrer, at påsætning af ethvert efterfølgende produkt, holdes sikkert på plads på kroppen.

Indikationer for brug:

- Som tætning/forsegling omkring en stomi
- Som tætningsmiddel omkring sår og kirurgiske drænsteder
- Til udligning af ujævn hud.

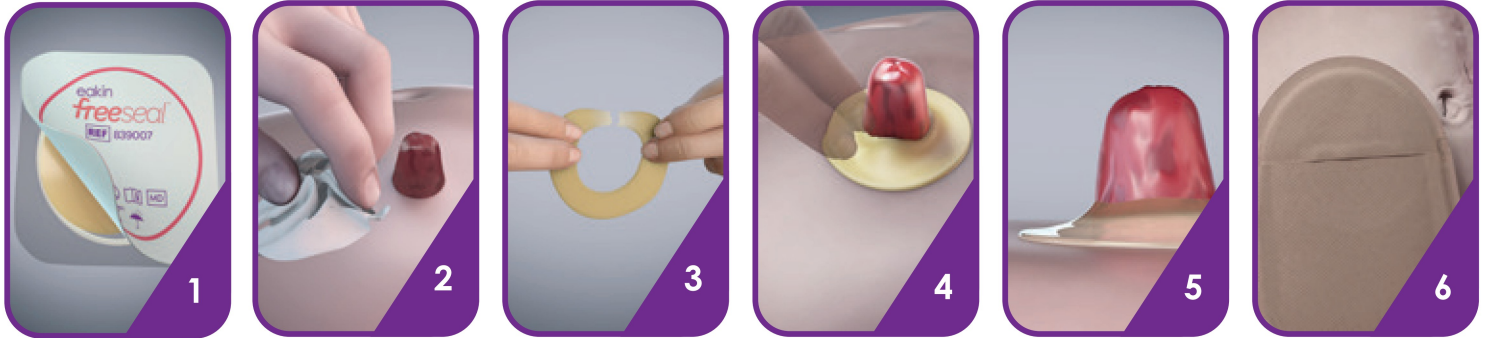

Brugsanvisning:

Påsætning

1. Tag tætningsringen ud af indpakningen
2. Sørg for, at hudområdet hvor ringen skal sættes på, er rent, tørt og fri for olie- eller creme rester.
3. Varm tætningsringen mellem dine hænder i ca. 20 – 30 sekunder indtil den bliver blød før du fjerner beskyttelses filmen. Stræk og form **eakin freeseal®** efter behov for at tilpasse den til området hvor den skal påsættes. Ringen kan også deles, klippes til og samles igen for bedre tilpasning rundt om vanskelige områder.
4. Placér ringen på huden med et let tryk og sørg for at holde på ringen på plads i kort tid, indtil **eakin freeseal®**-tætningsring sidder sikkert. Form og modellér **eakin freeseal®**-tætningsring rundt op langs kanten af stomien, omkring kanten af såret eller drænstedet.
5. Sørg for at ringen sidder tæt uden mellemrum/gab omkring stomiens bund for at give en maximal hud beskyttelse.
6. Anbring herefter stomi- eller opsamlingspose direkte på **eakin freeseal®**-tætningsringes overflade. Pres herefter tætningsring og pose sammen med et let tryk, indtil det klæber sikkert sammen med **eakin freeseal®**- tætningsring og den omkringliggende hud.

Fjernelse

Fjern forsigtigt stomi- eller opsamlingspose fra huden. Fjern **eakin freeseal®**-tætningsringe ved forsigtigt at skrælle og rulle materialet væk fra den ydre kant. For at lette aftagning, forsøg at fjerne ringen i ét stykke.

En medicinsk klæbefjerner kan anvendes til at fjerne **eakin freeseal®** klæberester fra huden.

Bortskaffelse

Bortskaf affaldsprodukter i henhold til de lokale retningslinjer

Advarsler

Kontakt sundhedsfagligt personale inden brug hvis du har hudirritation, rødme eller ubehag i hudområdet omkring din stomi. Hvis du under brug oplever nogle af ovennævnte symptomer, skal du ophøre med brugen af ringen og kontakte sundhedsfagligt personale. Påsæt ikke tætningsringen på ødelagt hud eller på åbne sår.

Genbrug af et engangsprodukt, kan forårsage skade på brugeren pga. risiko for smitte og forringelse af produktets funktion.

Andre oplysninger

Opbevares fladt i æsken ved stuetemperatur mellem 10° og 30° Celsius. Må ikke opbevares i køleskab.

eakin® påtager sig intet ansvar for personskade eller andet tab, der kan opstå, hvis dette produkt bruges på en måde, der strider mod **eakin®**'s aktuelle anbefalinger.

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brugen af dette produkt, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor det anvendes. En alvorlig hændelse er en, der involverer alvorlig forringelse af helbredet eller patientens død.

Medicinsk udstyr	Opbevares tørt
Temperaturgrænse 10°C	Kan genanvendes (kun kartonen)
Må ikke genbruges	Udløbsdato



TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road,
Co. Down, BT23 5QY, U.K.
Tel: +44 (0)28 9187 1000
Fax: +44 (0)28 9187 1111

mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu