


Brugervejledning: Bedal 4 - EPI / PNB fikseringsenhed

STERIL ENHED • HYPOALLERGENISK TAPE • LATEX FRI • DEHP FRI • INGEN PVC • BRUGSTID: 7 DAGE


ENHEDSPLACERING

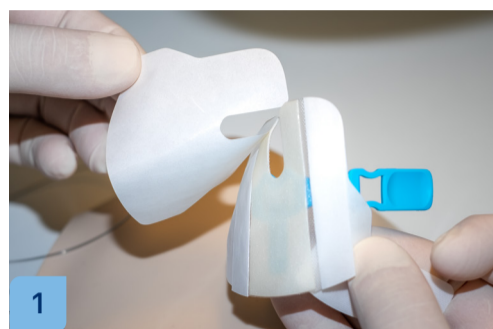


Træk det store papir af forbindelsen [1].




Placer enheden under kateteret, røret eller ledningen og pres forbindelsen fast på huden [2].

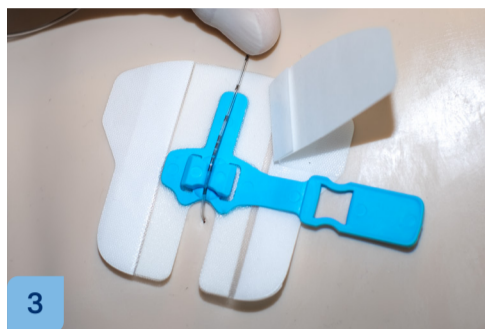


Sæt det compatible kateter, rør eller ledning i den bløde rende [3].

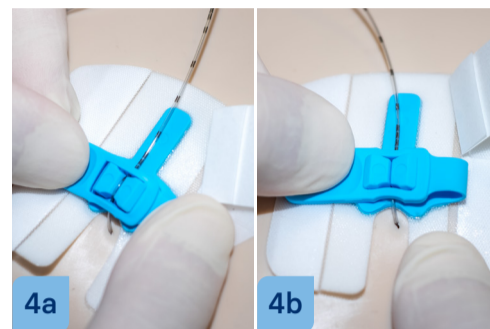

Placer den bløde klemme over den bløde base [4a], og luk klemmen ved at hægte begge bløde holdere på klemmen [4b]. Tip: Luk først siden med snoren og derefter siden med kanten.

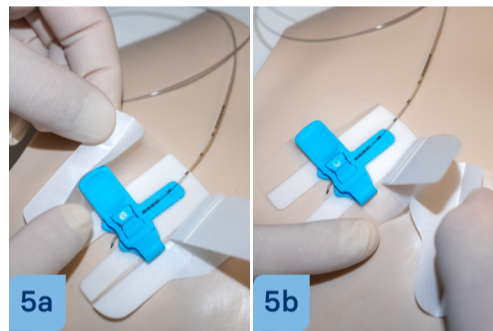


Træk papiret i venstre [5a] og højre [5b] side af forbindingsindlægget, og pres forbindelsen på huden.

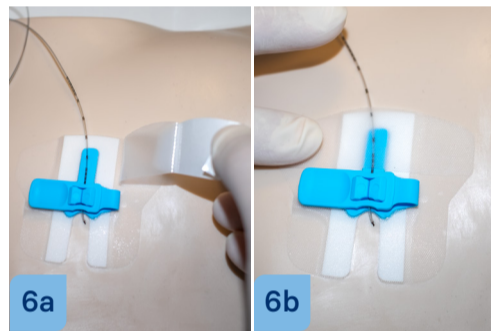

Træk derefter papiret af den ekstra strimmel [6a] og tildæk kateteret med strimlen [6b]. Pres den ekstra strimmel på huden.




Placer en gennemsigtig forbindelse over indgangssiden og fastgørelsesenheden [7].

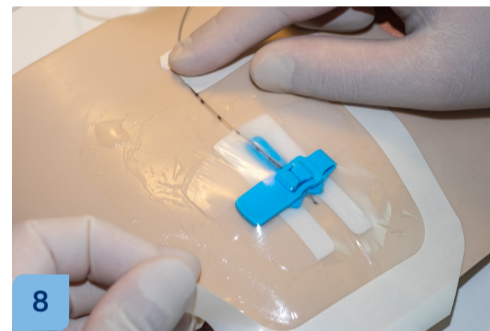


Fjern papirmellemlægget fra den gennemsigtige forbindelse, og pres den gennemsigtige forbindelse fast på huden [8].

FJERNELSE AF ENHED

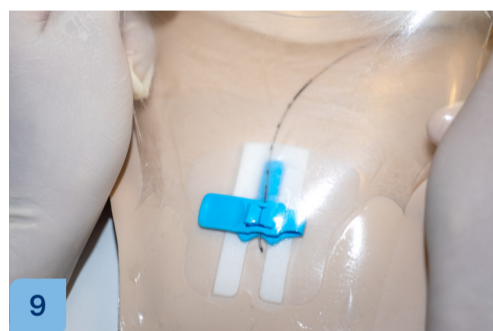


Fjern den gennemsigtige forbindelse ved hjælp af strækketeknikken [9].

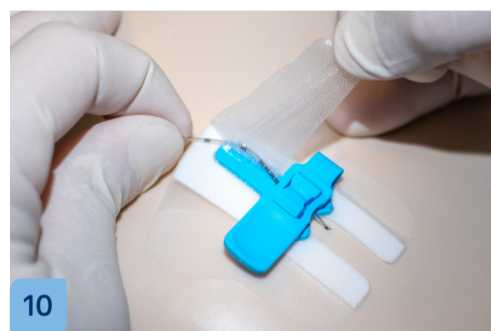

Træk den ekstra strimmel af og træk den til siden [10].



Åbn klemmen ved at holde fast i den bløde kant og trække den til siden [11].

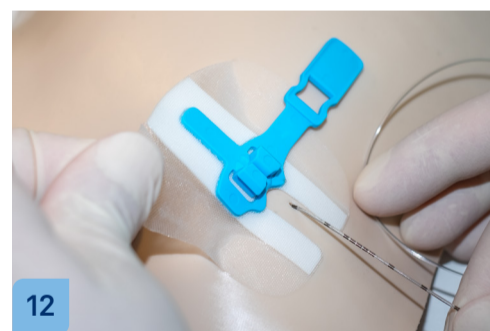

Fjern kateteret fra den bløde rende, og fjern derefter fastgørelsesenheden ved at trække forbindingsindlægget af huden [12].