

**Forholdsregler**

Produktet må ikke sættes direkte på sår.

Produktet må ikke anvendes til patienter med en kendt følsomhed over for sølv.

I tilfælde af infektion erstatter brug af produktet ikke behovet for passende infektionsbehandling i henhold til lokale retningslinjer.

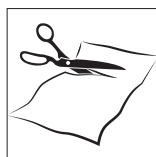
Produktet skal fjernes inden strålebehandling eller undersøgelser, der omfatter røntgen, ultralydsbehandling, diatermi eller mikrobølger.

Produktet må ikke vaskes.

Produktet må ikke være anvendes ved brusebad eller under badning.

**Anvendelse****Forberedelse**

Rens forsigtigt huden, og dub området tørt uden at gnide.

**Påsætning**

Mål og klip et passende stykke tekstil med en ren saks. Efterlad mindst 5 cm tekstil uden for hudfolden, så fugten kan fordampe.

Anbring et enkelt lag tekstil i hudfolden, og sørg for at kanten af tekstile er på linje med bunden af hudfolden.

Glat forsigtigt tekstile på huden for at opnå en jævn overflade.

Efterlad mindst 5 cm tekstil uden for hudfolden.

Hold tekstile på plads med hudfolden eller under tøj.



Hvert stykke tekstil kan bruges i maksimalt 5 dage afhængigt af tilsmudsning, lugt, mængde af fugt og hudens generelle tilstand. Tekstile kan dog fjernes inden 5 dage, f.eks. under brusebad eller bad og erstattes af et nyt stykke tekstil.

**Aftagning**

Fjern tekstile ved at skille hudfolden og tekstile fra hinanden og løft forsigtigt tekstile af.

**Bortskaffelse**

Produktet skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

**Brugervejledning**

23321729 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S.

Alle rettigheder forbeholdes. © 2018-12-21

**Indikationer**

Produktet er tilsigtet at blive brugt som hudbeskyttelse ved håndtering af hudskader i hudfolder og/eller steder, hvor hud er i kontakt med hud.

Produktet er indiceret til brug på hud mellem hudoverflader, der er i berøring med hinanden, hvis der forekommer eller forventes inflammation og/eller irritation som følge af sved og friktion. Symptomer kan betegnes intertrigo.

Intertrigo (intertriginøs dermatitis) er en form for fugtrelateret hudskade, der ofte ses i kropsområder såsom armhulerne, under brysterne, på maven, i lysken og mellem fingrene og tæerne.

**Kontraindikationer**

Brug af produktet til børn, gravide eller ammende kvinder er ikke blevet undersøgt. Brug af produktet til denne gruppe kan ikke anbefales på grund af manglende data. Ret henvendelse til en sundhedsmedarbejder for yderligere rådgivning.

**Information**

Produktet er et esterilt polyester tekstil, der reducerer friktion mellem hudfolder og bortleder fugt. Stoffet indeholder et sølvkompleks, der har en antimikrobiel virkning på de mikroorganismer, der normalt findes i hudfolder. Den antimikrobielle aktivitet kan også hjælpe med at reducere lugt.

Hvis hudlidelsen ikke forbedres inden for 4 ugers brug, skal en sundhedsperson vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Hvis du får en formodet allergisk reaktion (såsom udslæt, kløe, rødme eller blæredannelse) eller andre bivirkninger, bedes du kontakte din læge.

Produktet kan forblive påsat under MR-scanning (magnetisk resonansundersøgelse). Det er forligneligt med op til 3 tesla.

Brug af pudder, salve, creme eller blødgørende midler sammen med produktet kan forhindre det i at virke efter hensigten.

Produktet skal opbevares tørt ved stuetemperatur i sin oprindelige emballage, indtil det skal bruges.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.