

Intrafix® SafeSet



1. Udluftningsventil

- Enkel udluftningsventil med 5µm filter
- Intet behov for ekstra udluftningskanyle
- Ventilen skal **først åbnes** når dråbekammeret er fyldt op til den grønne ring.

2. Dråbekammeret

- Har et 15µm filter samt en særlig air-stop membran
- Væske fyldes op til den grønne ring
- Fyldning af infusionssettet kan tage få sekunder længere end almindelige sæt grundet luftstopmembranen

3. AIR-stop/luftstop

- Når dråbekammeret er tomt modvirker air-stop-membranen luft i infusionsslangen

4. Rulleklemmen

- Ergonomisk korrekt → ingen skarpe kanter og let at rulle med

5. 3-vejshanen

- Ved hver 45° drejning mærkes et klik, som sikrer en korrekt indstilling
- Er rotérbar – giver en sikker og let indgang
- Lavet af "crackresistant" materiale, så utætheder, kontaminering og luftemboli undgås

6. Den grønne beskyttelsehætte

- Har Primestop → en vandafvisende membran som forhindrer væskelækage og utilsigtet indånding. Primestop gør at sættet kan fylde sig selv, efter at dråbekammeret er fyldt op. Slangen sættes blot fast i hakket i rulleklemmen.
- Den grønne prop skal **knækkes** af

7. Sikker bortskaffelse

- Spiken placeres i holderen på rulleklemmen. Slangen trækkes ned og rulleklemmen lukkes. Sættet kan derefter kasseres som almindelig affald, såfremt der kun er anvendt ufarlige væsker. Man undgår således at knække spiken eller klippe dråbekammeret af



NB!! Airstop membranen ophører med at virke ved TRYKINFUSION
Ved tryk infusioner skal ventilen holdes lukket og infusionssettet håndteres som et almindeligt infusionsæt UDEN Airstop funktion.

Intrafix® SafeSet

Klar til brug på få sekunder



1
Desinficer porten til infusionsbeholderen (ikke nødvendigt på Ecoflac® Plus). Punktér beholderen lodret. Luk rulleklemmen før infusionsbeholderen hænges op.



2
Tryk på dråbekammeret og fyld væske op til den grønne ring. Luftventilen skal være lukket ved brug af sammenklappelige poser (som f.eks. Ecoflac® Plus). Ved brug af glasflasker skal luftventilen først åbnes efter dråbekammeret er fyldt.



3
Åben rulleklemmen. Væsken begynder at løbe. Påfyldning af slangen sker automatisk op til den indbyggede PrimeStop.



4
Fjern infusionsslangen fra rulleklemmen for at tilkoble til patienten. NB! Luk rulleklemmen!



5
Fjern beskyttelseshætten med den indbyggede PrimeStop ved at knække den sidelæns af. Tilslut derefter patienten.



6
Åben rulleklemmen og indstil den ønskede infusionshastighed. Når beholderen er tom, forhindrer AirStop funktionen luft i at trænge ned i infusionsslangen.

Brugerfordele

- Højere sikkerhedsniveau - forhindrer luftembolier, infusionsrelaterede infektioner og medicinindånding
- Større brugervenlighed - forenklet tilslutning og mindre stress
- Forbedret effektivitet - mindre arbejdsbelastning og nem bortskaffelse

