

# Brugsanvisning

Hvert brev indeholder en enkeltdosis på 50 g, hvilket gør det nemt at opnå det ønskede blandingsforhold (2-5%).

Brugsanvisning: Bland produktet med rent og varmt vand (30-40°C). Granulatet opløses hurtigere ved omrøring. Når pulveret er opløst, er desinfektionsmidlet klart til brug. Udskift den brugte opløsning hver dag. Ren, ubrugt opløsning (2%) kan anvendes i op til 7 dage. Ren, ubrugt opløsning (5%) kan anvendes i op til 2 dage.



	Erisan Oxy+	Opløsning	Note	Holdbarhed for ubrugt opløsning
Desinfektion af overflader og medicinsk udstyr	1 brev/2,5 liter vand	2%	Bakterier, noro- og adenovirus, gærsvampe 2% fungi 5%	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%		2 dage
Områder kontamineret med kropvæsker	1 brev/2,5 liter vand	2%	2-step	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%		1-step
Desinfektion af instrumenter (henstand) og tandproteser	1 brev/2,5 liter vand	2%	Bakterier, mykobakterier, noro- og adenovirus, gær 2% i 30 min. Eller 5% i 15 min. I tildækket beholder. Skyl efter med rent vand.	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%		2 dage
High Level desinfektion	1 brev/1 liter vand	5%	30 min. (polio og sporer). Skyl med rent eller sterilt vand.	2 dage. Brug kun opløsningen en gang.
Ultralydsrensere	1 brev/2,5 liter vand 1 brev/1 liter vand		30 min. (total iblødlægningstid), skyl 15 min. (total iblødlægningstid), skyl	Udskift dagligt
Dentalt sugesystem	1 brev/2,5 liter vand		Brug 1 liter færdigblandet opløsning, skyl af næste morgen.	
Vask og desinfektion af tekstiler	1 brev og ½ mængde vaskemiddel i skuffen		Vaskemaskine, 40-60°C på normalt vaskeprogram (5 kg vasketøj)	