

Vitrex Allergy

Formål Allergi Prik Lancet

Brugervejledning




PRODUKT:

Vitrex Allergi Lancet bruges til at prikke hul i huden i forbindelse med undersøgelse for allergi.

- Steril og til engangsbrug
- Lavet af rustfrit stål
- Gammabestråling med kobolt
- Holdbarhed 5 år.





Dimensioner:

- Længde: $39,0 \pm 1,0$ mm
- Bredde: $5,5 \pm 0,5$ mm

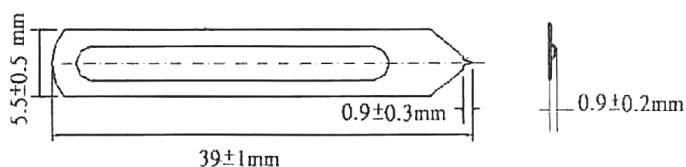

BRUGERVEJLEDNING:

1. Placer nålespidsen på det ønskede prøvested og prik hul i huden.
2. Efter brug, smid den brugte lancet i en godkendt beholder efter gældende retningslinjer.

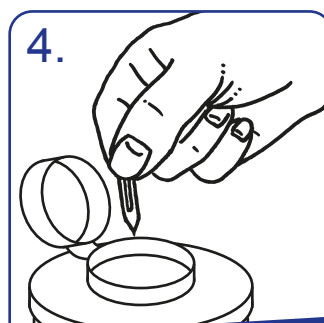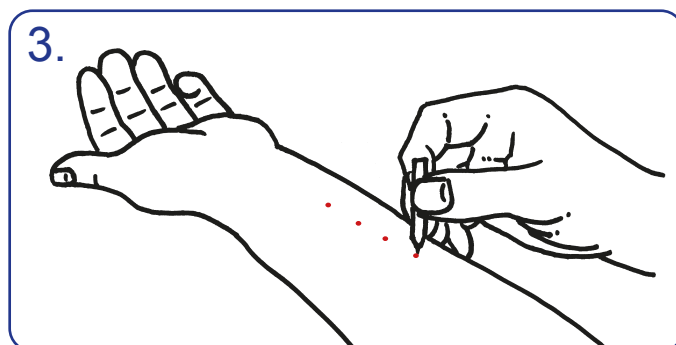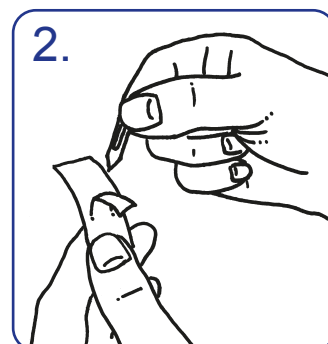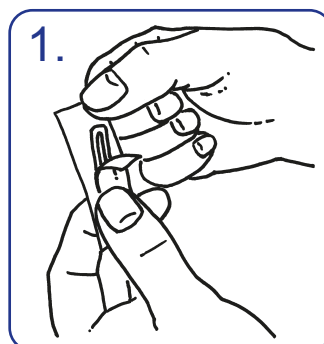

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Produkt	Beskrivelse	Varenummer
Vitrex Allergy	Fladbladet steril lancet	365213

MATERIALE:

Materialet brugt til at lave Vitrex engangslancet er medicinsk:

Komponent	Materiale
Nål	Rustfrit stål Grad X 5 Cr18Ni9 til DIN 17440

ADVARSEL:

Brug ikke lancetten hvis indpakningen er ødelagt eller brudt.
Hold venligst væk fra børn.
Bortskaf den brugte lancet i en godkendt beholder efter gældende retningslinjer.

