



# Brugervejledning

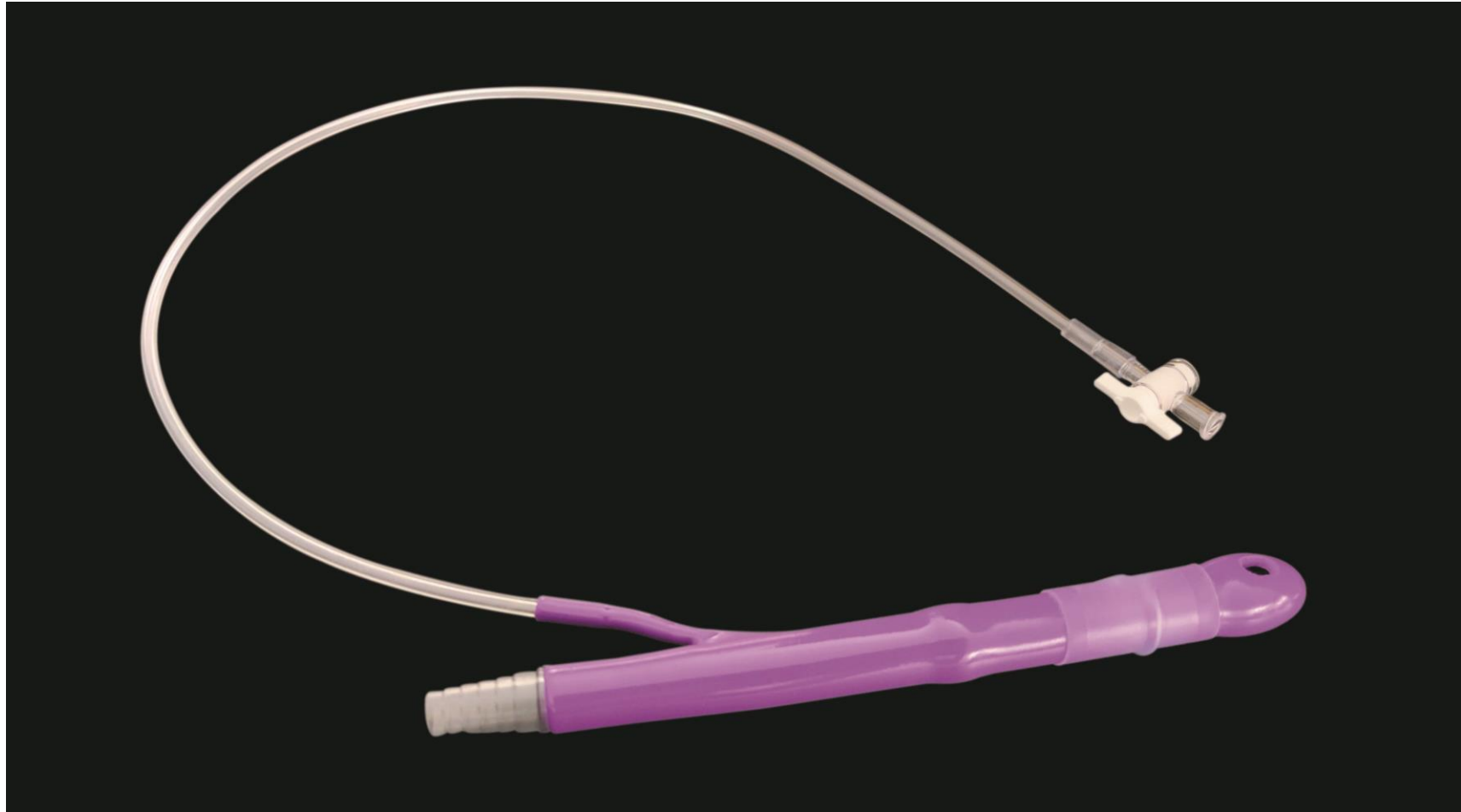


# TRIN FOR TRIN GUIDE TIL PÅFYLDNING AF LUFT I KATETERBALLONEN

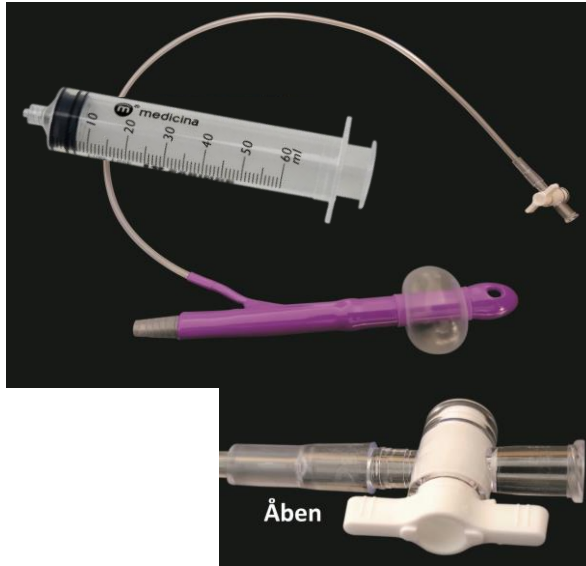

## ***Påfyldning af luft i ballonen***


1. Når ballonen fyldes med luft skal drejeventilen være på langs med slangen.
2. Sprøjten\* gøres klar med luft og skrues fast på luftventilen.
3. Når ballonen er fyldt med den ønskede mængde luft, drejes drejeventilen på tværs af slangen, og sprøjten\* kan fjernes.

Hvis der ikke skal mere luft i ballonen gå til punkt 9, ellers gå til punkt 4.

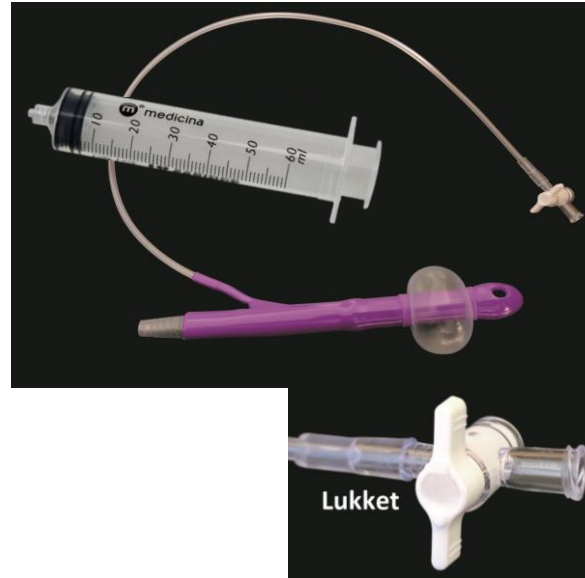

## ***Ønskes der mere luft i ballonen end ved første påfyldning se nedenstående trin***

4. Drejeventilen forbliver lukket.
5. Sprøjten\* gøres igen klar med luft.
6. Sprøjten\* skrues fast på luftventilen.
7. Drejeventilen åbnes, hold kontra på sprøjten\*.
8. Luft kan nu pumpes ind i ballonen og drejeventilen lukkes, inden sprøjten\* igen kan fjernes fra luftventilen.

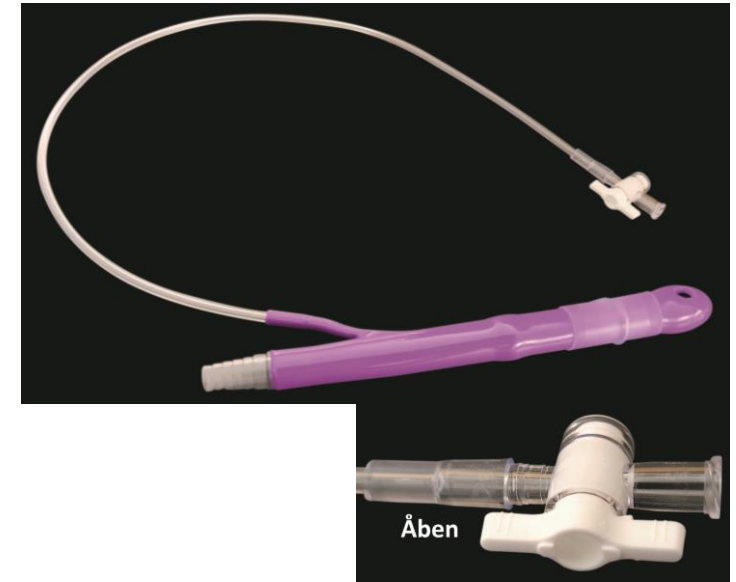

## ***Luft ud af ballonen***

9. For at få luften ud af ballonen igen, skal drejeventilen drejes på langs med slangen. Luften vil nu sive ud af ballonen.

\*Sprøjten skal være med Luer Lock

Hardam A/S • Fabersvej 15 • 7500 Holstebro • 97 42 32 33 • [www.hardam-shop.dk](http://www.hardam-shop.dk)