

Hudvänliga egenskaper:

Fjädern används som märkning av produkter som ger stark och säker fixering samtidigt som de minimerar hudskador.

Applicering av 3M™ Nasogastrisk Fästnanordning


Guide för applicering och borttagning

Applicering av 3M™ Nasogastrisk Fästnanordning




Förbered huden

- Hud och sond ska vara rena, torra och fria från rester och hudolja.
- För att säkerställa god vidhäftningsförmåga måste hudrengöringsmedel och eventuellt hudskydd torka ordentligt.
- Öppna förpackningen och lägg den åt sidan.

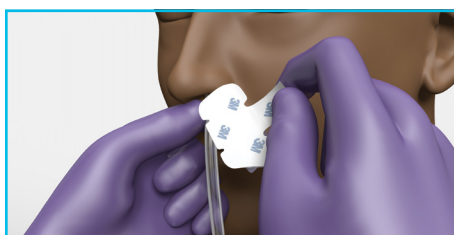


Ta bort enhetens övre skyddspapper

- För in sonden i enlighet med verksamhetens rutiner.
 - Ta bort det övre skyddspappret från fixeringsanordningen så att häftämnet exponeras.
- Obs!** Se till att sonden är stabiliserad under hela fixeringsprocessen.

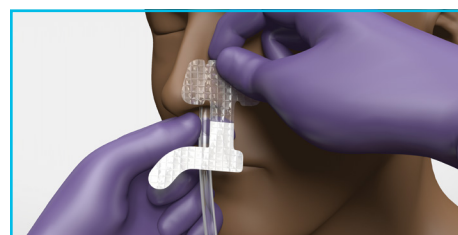


Placera fästnanordningen

- Placera fästnanordningen på sidan av näsan där sonden har förts in.
- Centrera över näsvingen och placera fästnanordningen på näsan.
- Om möjligt, säkerställ att fästnanordningen passas in i vecket mellan näsvingen och kinden.
- Applicera tryck på fästnanordningen för att förbättra vidhäftningen.

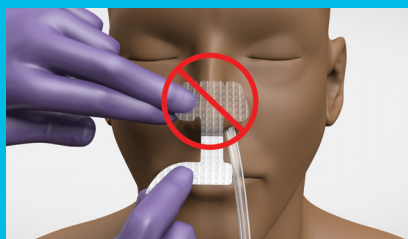


OBS! Centrera INTE över näsan

Med en icke centrerad placering kan slangarna hänga fritt för att minimera kontakten med näsborrarna.

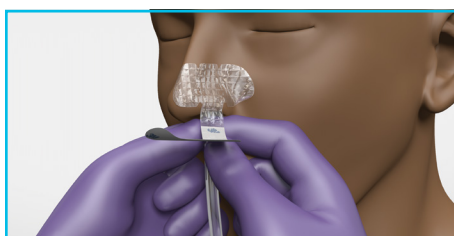

Ta bort det nedre skyddspappret

- Ta bort det nedre skyddspappret från fästnanordningen så att fästytan exponeras.
- Placera sonden så att den är i linje med den vertikala änden på fästnanordningen.
- Tryck bestämt på fästnanordningen för att förbättra vidhäftningen till slangarna.

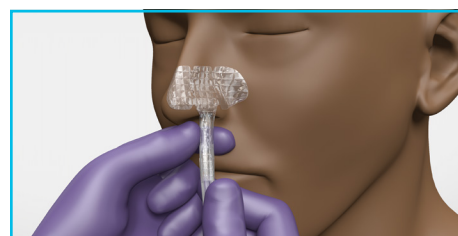


Linda och skydda

- Linda den horisontella delen i en spiral kring sonden.
- Tryck bestämt på hela enheten för att förbättra vidhäftningen.


Obs! Linda inte änden på 3M™ Nasogastrisk Fästnanordning för hårt eller för nära näsborrarna eftersom detta kan medföra att enheten orsakar tryckskador.

Underhåll och tips för 3M™ Nasogastrisk Fästeanordning

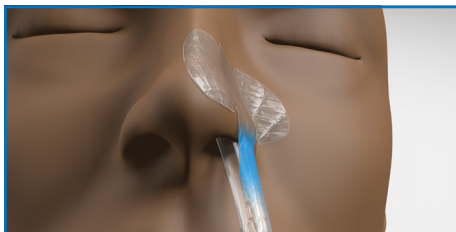

Ikke vidhäftande egenskaper


- Fästeanordningen har en ikke vidhäftande del placerad vid näsroten för att sonden ska kunna hänga fritt.
- Tejpa inte över produkten i ett försök att fästa den bättre.
- En ikke vidhäftande flik i änden på produkten är avsedd för att underlätta borttagning.

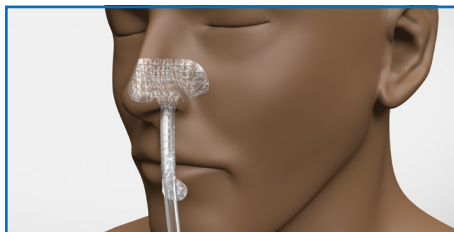

Övervaka


- Appliceringsplatsen måste observeras regelbundet enligt verksamhetens rutiner för tecken på hudkomplikationer eller förflyttning av sonden.
- Hudkomplikationer kan yttra sig som rodnad, färgförändringar, hud som är onormalt varm eller kall vid beröring. hudrodnad som inte bleknar vid tryck, smärta, stickande känsla eller klåda.
- Om hudirritation eller skada misstänks så ska du ta bort fästeanordningen, inspektera platsen och fastställa lämpliga medicinska åtgärder.

Byta ut fästeanordningen

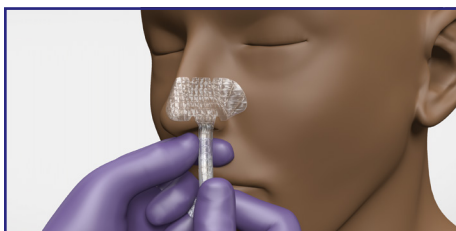

Linda av

- Håll sonden stadigt medan du lindar av fästeanordningen med hjälp av den ikke vidhäftande fliken på änden.

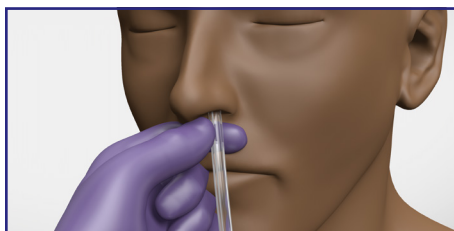

Ta bort och byt ut

- Ta bort fästeanordningen från näsan samtidigt som du stabiliserar sonden.
- När du har tagit bort fästeanordningen kan du applicera en ny.

Obs! Dra lågt och långsamt.

Obs! Se till att huden och sonderna är rena, torra och fria från rester och hudolja innan du applicerar en ny fästeanordning.

Borttagning av enheten



Avsluta behandlingen

- Ta bort fästeanordningen från näsan.
- Ta bort sonden från patienten.

Obs! Dra lågt och långsamt.

Se produktens bruksanvisning för ytterligare viktig information.



3M Svenska AB
Herrjärva torg
170 67 Solna

Besök [3M.com/MedicalSecurement](https://www.3m.com/MedicalSecurement) om du vill veta mer.

© 2022 3M. Med ensamrätt.
3M och andra varumärken som visas är varumärken och/eller registrerade varumärken. Obehörig användning är otillåten. Används på licens i Kanada.
GL_ENG_70-2013-1311-4