


# BRUGERINSTRUKTION FOR ANTISEPTISK BODY WASH

## Brug biocider sikkert



- Inden du begynder, skal du vaske dine hænder, og det anbefales at bruge engangshandsker til hygiejnisk formål.
- Inden brug af Swash<sup>®</sup> Gold Gloves Antiseptic, vask ansigt og hår på almindelig vis. Brug ikke balsam eller andre hårprodukter udover shampoo.
- Du kan bruge en mikrobølgeovn til at varme handskerne. Temperaturen opnås ved at varme emballagen ved 800 watt i en mikrobølgeovn i maksimalt 15 sekunder. Opvarmning er for patientens velbehag. Det er ikke påkrævet. Kolde handsker er aktive og kan bruges, hvis patienten ønsker en kølig klud.
- Åbn emballagen ved at trække lukningen åben. Kontroller vaskehandskens temperatur. Bemærk: engangshandsker reducere din følsomhed over for varme.
- Læg ikke Swash<sup>®</sup> Gold Gloves Antiseptic direkte på sengetøjet, idet kontakt med blegemiddel kan lave brune pletter.
- Brug ikke Swash<sup>®</sup> Gold Gloves Antiseptic over kæbelinjen. Klorhexidin må ikke komme i kontakt med øjne eller øregange.
- Vask forsigtigt hvert område på kroppen i den viste rækkefølge ved at bevæge handsken frem og tilbage. Brug alle 7 handsker til at vaske hele kroppen under kæbelinjen.

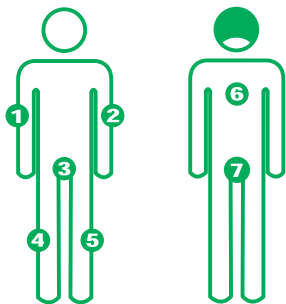

- Handske 1: Højre arm, skulder, hånd, mellem fingrene, armhule og højre side af brystet.
- Handske 2: Venstre arm, skulder, hånd, mellem fingrene, armhule og højre side af brystet.
- Handske 3: Mave og derefter lysken/perineum. Må IKKE anvendes på kønsdelene.
- Handske 4: Venstre ben, fod og mellem tærerne.
- Handske 5: Højre ben, fod og mellem tærerne.
- Handske 6: Nakke og ryg.
- Handske 7: Baller

- Skrub IKKE og brug IKKE indvendigt. Må IKKE bruges over kæbelinjen. Skyl IKKE og påfør IKKE lotion. Må ikke skylles ud.
- Hvis der opstår kløe, en brændende fornemmelse eller udslet, skal området vaskes med vand. Gentag ikke brug. Kontakt en specialist/hudlæge, hvis nødvendigt.
- Hver pakke må kun bruges til én person. Det anbefales ikke at gemme eller genbruge åbnede pakker pga. fare for infektion.
- Brug IKKE en åbnet pakke efter 48 timer.

