

(SOLUNUM SİSTEMLERİ)  
BREATHING CIRCUIT

---

TR

EN

D

IT

NL

RU

PL

GRE

HU

AR

PER

CZ

ES

DK

FR

RO

**BRUGSANVISNING**

Følgende instruktion er gældende for at opnå maximal performance og sikkerhed ved brug af ventilationssystemet.

Dette ventilationssystemet opfylder gældende standarder ISO 80601-2-13 & ISO 5356- 1 samt medicinsk direktiv 93/42/EEC .Mange af de komponenternes dele er svejsede for at undgå lækage af systemet. Undgå at fjerne dele af systemet eller ændre det. Inden brug anbefales det at efterse , at alle konnektorer sidder korrekt og lækagetest skal udføres inden systemet anvendes til en patient.

Hvis der er en åndedrækspose, der sidder inde i kredsløbspakken separat , skal du i tilfælde af brug fastgøre vejtrækningen til forlængelsen og kontrollere den korrekte vedhætning.

Før patientens brug skal du kontrollere integriteten af hele systemet og udføre en tryk- og lækagetest på hele vejtrækningen og kontrollere om der er okklusioner. Indstil og kontrollér relevante anæstesiemaskinalarmer.

**ADVARSEL:**

- 1.Cirkelsystemet er fremstillet til at single patient use og maximal anvendelse i 7 dage.
- 2.Ethvert forsøg på resterilisation kan skade produktet og øge modstanden i systemet.
3. Produktet er fremstillet i ren rum. Bør ikke anvendes, hvis indpakningen er beskadiget.
- 4.Produktet bør kun anvendes af kvalificeret klinisk personale.
- 5.Produktets holdbarhed (Shelf life) er 5 år.
- 6.Flowmodstand ( Resistanceto flow 30 l/min?0,1kPa).

## EXPLANATION OF SYMBOLS



Yeniden kullanmayın  
Do not reuse  
Nicht zur Wiederverwendung  
Ne pas réutiliser  
Non riutilizzare  
Niet hergebruiken  
Năo reutilizar  
Mă ikke genbruges  
Nie używać ponownie  
Nie używać ponownie  
Nem újrafelhasználható  
Να μη χρησιμοποιείται ξανά  
请勿重复使用  
Nu reutilizați  
Не использовать повторно



Yağmurdan uzak tutun  
Keep away from rain  
Vor Regen schützen  
Tenir à l'abri de la pluie  
Tenere lontano dalla pioggia  
Niet blootstellen aan regen  
Mantenha afastado da chuva  
Skal beskyttes mod regn  
Chronić przed deszczem  
Chraňte před deštěm  
Védje az eső ellen  
Να φυλάσσεται μακριά από βροχή  
请勿淋雨  
Feriti de ploaie  
Оберегать от попадания воды



Güneş ışığından uzak tutun  
Keep away from sunlight  
Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren  
Tenir à l'abri des rayons du soleil  
Tenere lontano dalla luce solare  
Niet aan zonlicht blootstellen  
Mantener afastado da luz solar  
Skal beskyttes mod sollys  
Chronić przed światłem słonecznym  
Nevystavujte přímému slunečnému záření  
Ne érje közvetlen napfény  
Φροντίστε να παραμείνει μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία  
请勿放置于阳光直射处  
Feriti de lumina soarelui  
Беречь от солнечного света



Ambalajı zarar görmüşse kullanmayın  
Do not use if package is damaged.  
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden  
Ne pas utiliser l'appareil si l'emballage est endommagé  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Niet gebruiken, indien de verpakking beschadigd is  
Năo utiliza se a ambalagem estiver danificada  
Mă ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget  
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone  
Неpouживайте, pokud je balení poškozeno  
Ne használja, ha sérült a csomagolás  
Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί η συσκευασία του  
如果产品包装损坏,请勿使用  
A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat  
Нельзя использовать при поврежденной упаковке



Steril değil  
Non sterile  
unsteril  
Non-sterile  
Non-sterile  
Niet steril  
No estéril  
Usterilizeret  
niesterylny  
nesterilni  
nem steril  
μη αποστειρωμένος  
معقم غير  
استريل غير  
非无菌  
Nesteril  
Не стерильный



eIFU indicator

Kullanma kılavuzuna başvurun.  
Consult ifu.  
Bedienungsanleitung beachten.  
Consultare le istruzioni per l'uso.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.  
См. инструкцию по применению.  
Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Olvassa el a Használati útmutatót.  
Consulte as instruções de utilização.  
Viz návod k použití.  
Consulte las instrucciones de uso.  
Se brugsanvisningen.  
Consulte le mode d'emploi.  
Consultați instrucțiunile de utilizare.

6.Strömungswiderstand (Widerstand gegen den Fluss): 30L/min <0.1 kPa

**Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.**  
İbni Melek OSB Mh. Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900  
Tire - İzmir - Turkey  
Tel: +90 232 513 51 10 (Pbx)  
Fax: +90 232 513 51 14  
www.meditera.com.tr



CE  
1984



AW.04.ALT.AL.0235-REV.06 (08/2019) 1/6