

System til kontinuerlig glukoseovervågning

Quick Guide på dansk

1 Systemoversicht

- 1A Sensorpakke:** Dette er en steril pakke, hvor sensoren opbevares. Sensorpakken er designet til engangsbrug.
- 1B Sender-pakke:** Senderen klikkes på sensoren og sender glukosemålinger i realtid trådløst til din kompatible skærmenhed via Bluetooth.

2 Opsætning af app

Sikker internetadgang er påkrævet under opsætningen

1. Kom i gang

- Lad ned **iCan**-appen fra App Store eller Google Play.
- Åbn appen.
- Log ind eller opret en konto.

2. Opsætning

- Følg **app-instruktionerne** for at udføre opsætning og par med senderen.
- For instruktioner om indsættelse af sensoren, brug **Indsættelse af sensoren** nedenfor.

3. Sensoropvarmning

Under den 2-timer lange sensoropvarmning får du ingen aflæsninger eller advarsler, før opvarmningen er færdig.

4. Forstå dine CGM-resultater

Gå til iCan-brugervejledningen for at finde flere oplysninger.

3 Indsætning af sensoren

1. Par med senderen

- 1a** Træk senderpakken ud fra bunden af sensorpakken.
- 1b** Kontrollér de første 8 cifre af SN-koden på senderpakken senderpakken og sender SN-koder for at matche med hinanden, *tør du parrer sensoren med senderen.*
- 1c** Åbn din app, og sørg for at slå Bluetooth til. Scan QR-koden på sensorpakken med din app.

2. Gør dig klar

- 2a** Vask dine hænder med vand og sæbe.
- 2b** Vælg et indstikssted på maven.
Forsigtig: Undgå ar, modermærker, strækmærker, knuder og insulinindstiksteder. For at undgå hudirritation, skal du skifte indstiksted. Tag hensyn til hvad der passer dig bedst og dine aktiviteter.
- 2c** Rengør indstiksstedet med spritservietter.
Forsigtig: Lad alkoholen tørre, før indsættelsen.

3. Samling sensorapplikatoren

- 3a** Træk låget helt af sensorpakken.
- 3b** Placer senderpakken på en hård, flad overflade. Ret det blå mærke på sensorapplikatoren ind efter mærket på senderbakken.
- 3c** Tryk sensorapplikatoren ned med et fast tryk i bakken, indtil du hører et klik, og den stopper.
- 3d** Drej forsigtigt sikkerhedskontakten fra ikonet "Låst" til ikonet "Låst op", indtil du hører et klik og ikke kan dreje længere.
Forsigtig: Tryk ikke på den hvide knap i midten, når sikkerhedskontakten er helt udløst, for at forhindre utilsigtede resultater eller personskade.
- 3e** Løft forsigtigt den monterede Sensor applikator lige op.
Forsigtig: Rør ikke ved klæbebåndet.
- 3f** Nu er Sensor applikatoren klar til at blive placeret.

4. Påsætning af sensor

- 4a** Placer den monterede Sensor applikator over det valgte sted.
- 4b** Tryk på knappen i midten, indtil du hører en klik lyd.
- 4c** Træk forsigtigt applikatoren væk fra din krop.
Forsigtig: Bortskaf den brugte applikator i henhold til lokale regler.
- 4d** Tryk på tapen rundt om sensoren, så det sidder godt fast på huden.
Forsigtig: Tjek sensorstedet for blødning, når du har sat sensoren fast.
Hvis der er blødning, som ikke stopper, skal sensoren fjernes, og der skal lægges et jævnt tryk på området med sterilt gaze, indtil blødningen stopper.

4 Efter 15 dage, afslut sessionen

1. Fjern sensoren

- Træk kanten af tapen op.
- Træk langsomt tapen væk fra huden i én bevægelse.

2. Bortskaffelse

Kassér den brugte sensor i henhold til lokale regler.