

Easy-Slide


- Brugsanvisning

ONEMED



Påtagning:

- 1) Tag Easy-Slide på foden
- 2) Tag strømpen udenpå Easy-Slide
- 3) Træk strømpen over hælen
- 4) Tag et fast greb i hælen og hold med den anden hånd i løkken på Easy-Slide
- 5) Træk derefter med små træk i løkken og tag Easy-Slide ud af strømpen

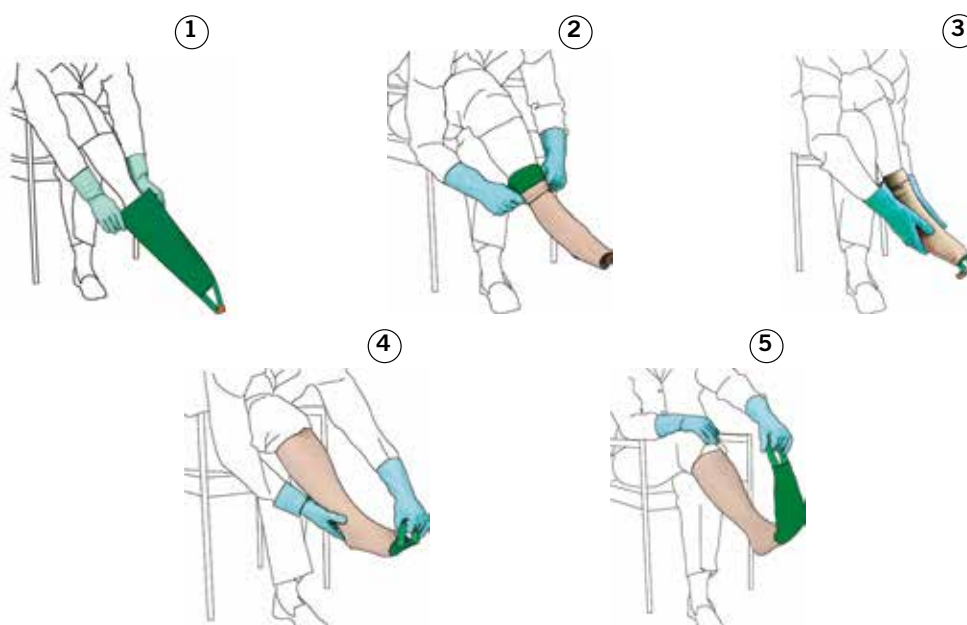

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
DK-8200 Aarhus N
CVR/VAT 19846679

Tel. (+45) 86 109 109
Fax (+45) 86 109 209
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk


Easy-Off



- Brugsanvisning

Aftagning:

- 1) Tag Easy-Off uden på strømpen
- 2) Fastgør velcrostroppen rund om benet lige over Deres ankel
- 3) Fold resten af Easy-Off ned over stroppen - så langt som muligt
- 4) Fold strømpen ud over Easy-Off - så langt De kan
- 5) Skub strømpe og Easy-Off ned over hælen i små bevægelser og tag begge dele af

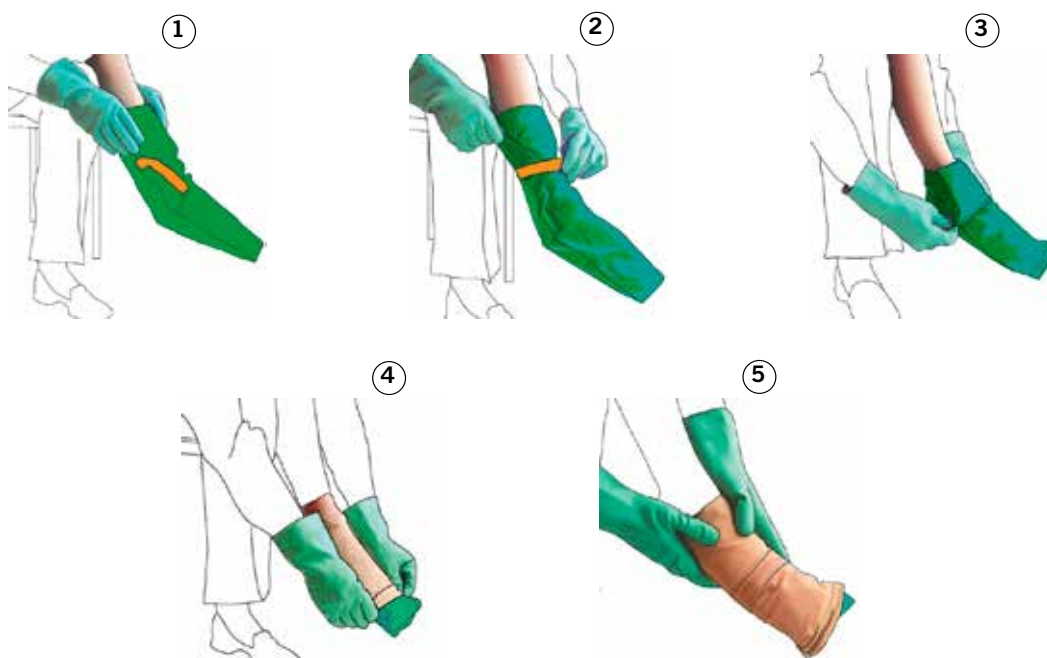

Rengøring:

Må kun håndvaskes ved lav temperatur (maks. 30°)

Kan også rengøres i en 70% ethanolopløsning

Lufttørres - må ikke stryges

Må ikke kemisk renses eller bleges

Produktet må ikke udsættes for stærke varmekilder, som f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer og lign.