


# Easy-Slide

## - Brugsanvisning




### Påtagning:

- 1) Tag Easy-Slide på foden
- 2) Tag strømpen udenpå Easy-Slide
- 3) Træk strømpen over hælen
- 4) Tag et fast greb i hælen og hold med den anden hånd i løkken på Easy-Slide
- 5) Træk derefter med små træk i løkken og tag Easy-Slide ud af strømpen

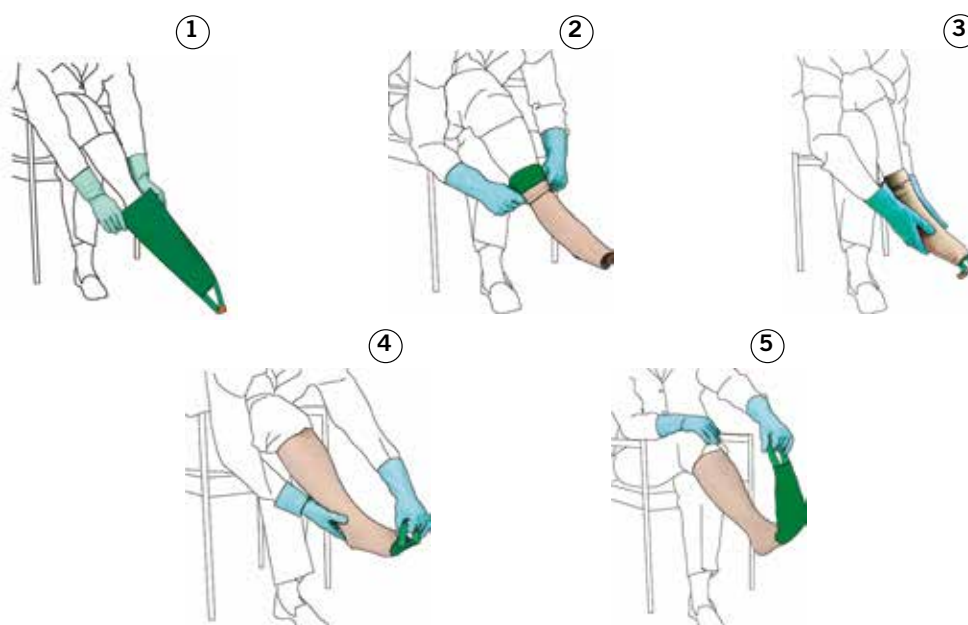

### Aftagning:

- 1) Tag Easy-Off uden på strømpen
- 2) Fastgør velcrostroppen rund om benet lige over Deres ankel
- 3) Fold resten af Easy-Off ned over stroppen - så langt som muligt
- 4) Fold strømpen ud over Easy-Off - så langt De kan
- 5) Skub strømpe og Easy-Off ned over hælen i små bevægelser og tag begge dele af

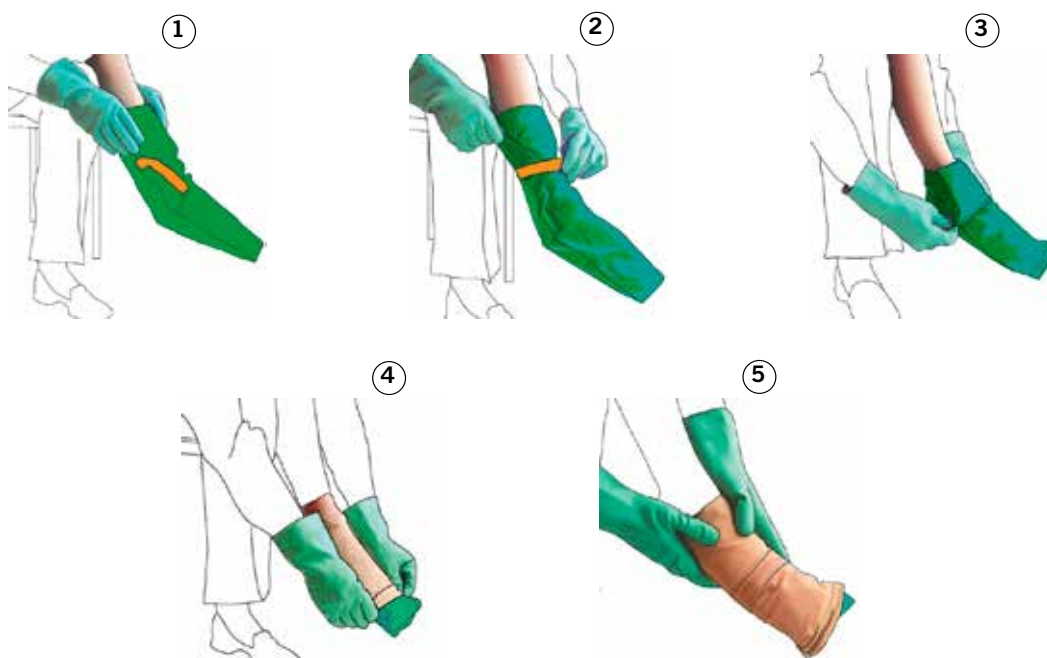

### Rengøring:

Må kun håndvaskes ved lav temperatur (maks. 30°)

Kan også rengøres i en 70% ethanolopløsning

Lufttørres - må ikke stryges

Må ikke kemisk renses eller bleges

Produktet må ikke udsættes for stærke varmekilder, som f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer og lign.