

Easy-Slide Arm




ONEMED

- Brugsanvisning



Påtagning:

- 1) Lad Easy-Slide Arm glide ind over armen
- 2) Træk strømpen over Easy-Slide Arm
- 3) Læg løkken om et dørhåndtag - hold strømpen på plads med den anden hånd
- 4) Træk langsomt Easy-Slide Arm ud af strømpen

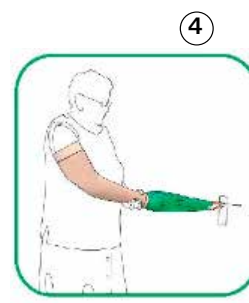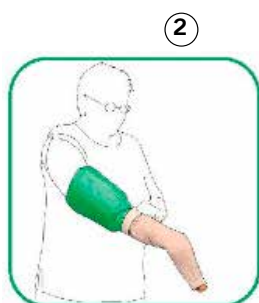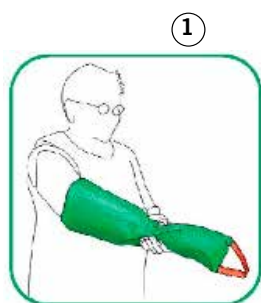

Rengøring:

Må kun håndvaskes ved lav temperatur (maks. 30°)

Kan også rengøres i en 70% ethanolopløsning

Lufttørres - må ikke stryges

Må ikke kemisk renses eller bleges

Produktet må ikke udsættes for stærke varmekilder, som f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer og lign.

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
DK-8200 Aarhus N
CVR/VAT 19846679

Tel. (+45) 86 109 109
Fax (+45) 86 109 209
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk