

# Sim-Slide

ONEMED


## - Brugsanvisning

---



### Påtagning:

- 1) Tag Sim-Slide på foden - træk forsigtigt i de orange greb
- 2) Tag strømpen udenpå Sim-Slide
- 3) Træk strømpen over hælen
- 4) Tag et fast greb i hælen og hold med den anden hånd i løkken på Sim-Slide
- 5) Træk derefter med små træk i løkken og tag Sim-Slide ud af strømpen

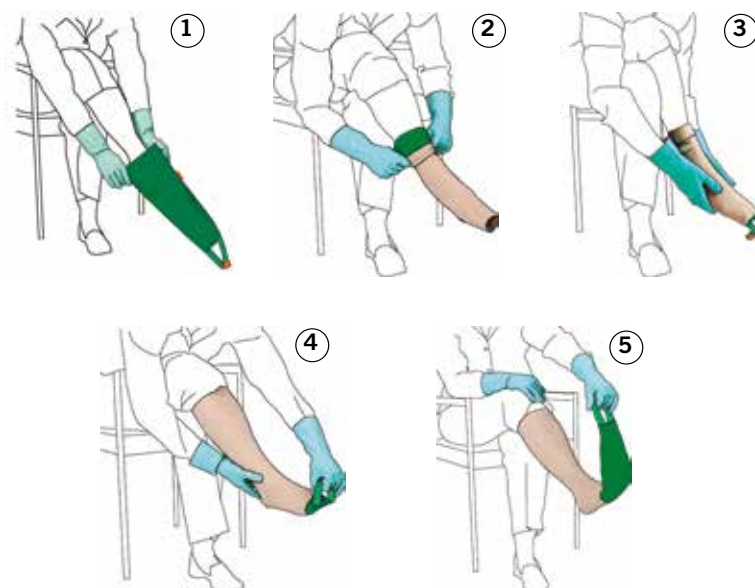

# Sim-Slide




## - Brugsanvisning

---

### Aftagning:

- 1) Træk Sim-Slide op over strømpen
- 2) Sæt de orange greb godt fast, således at Sim-Slide sidder lige op over anklen
- 3) Fold strømpen så meget som muligt over Sim-Slide
- 4) Tag strømpen og Sim-Slide af med små træk - start med hælen

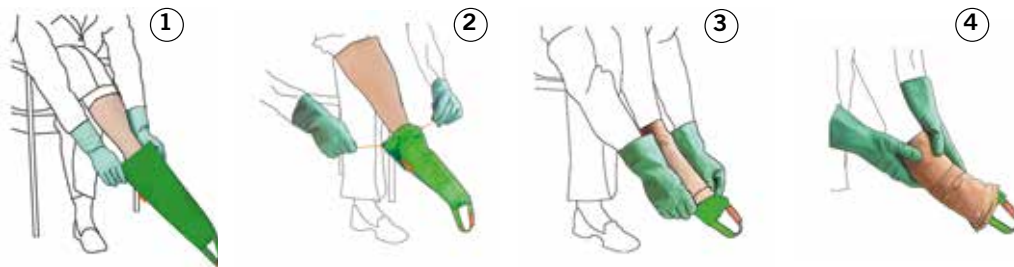

### Rengøring:

Må kun håndvaskes ved lav temperatur (maks. 30°)

Kan også rengøres i en 70% ethanolopløsning

Lufttørres - må ikke stryges

Må ikke kemisk renses eller bleges

Produktet må ikke udsættes for stærke varmekilder, som f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer og lign.