




# Magnide

## - Brugsanvisning




### Påtagning:

- 1) Placér Magnide på foden (sørg for, at den orange flap ved tærne er foldet rigtigt tilbage, så magneten klikker fast)
- 2) Træk strømpen ud over Magnide
- 3) Træk strømpen over foden, så hælen sidder på det rigtige sted
- 4) Sørg for, at den lysegrønne løkke kan nå i toppen af strømpen
- 5) Træk derefter i den lysegrønne løkke for at fjerne Magnide

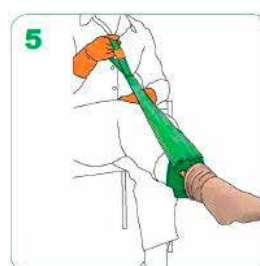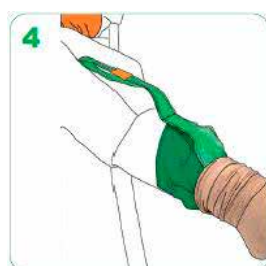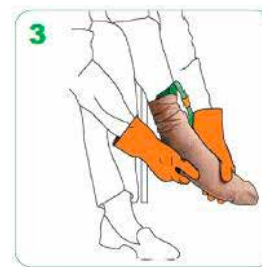

### Aftagning:

- 1) Tag Easy-Off uden på strømpen
- 2) Fastgør velcrostroppen rundt om benet lige over Deres ankel
- 3) Fold resten af Easy-Off ned over stroppen - så langt som muligt
- 4) Fold strømpen ud over Easy-Off - så langt De kan
- 5) Skub strømpe og Easy-Off ned over hælen i små bevægelser og tag begge dele af

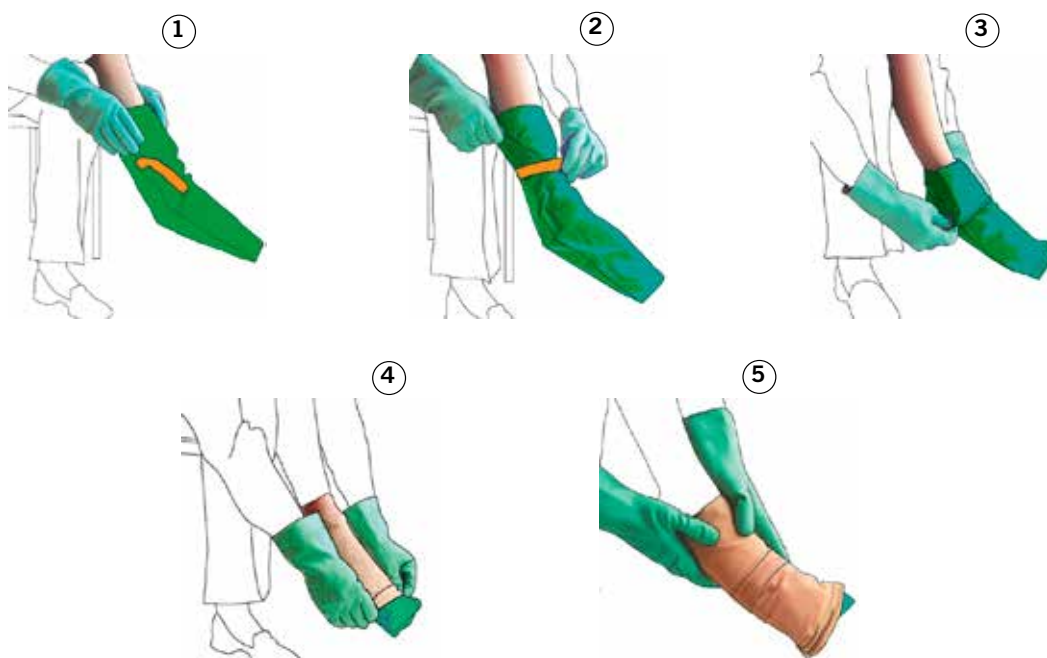

### Rengøring:

Må kun håndvaskes ved lav temperatur (maks. 30°)

Kan også rengøres i en 70% ethanolopløsning

Lufttørres - må ikke stryges

Må ikke kemisk renses eller bleges

Produktet må ikke udsættes for stærke varmekilder, som f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer og lign.