



Brugsanvisning Strømpepå- og aftager




9 Stik foden så langt ned i "posen" De kan

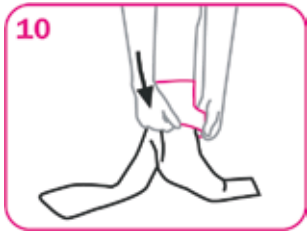

10 Træk Deres strømpe eller strømpebuks ned til det punkt, hvor **Mediven® 2 in 1** starter (omkring læggen)
Nu lægger De linningen eller kantbåndet på Deres kompressionsstrømpe over **Mediven® 2 in 1**

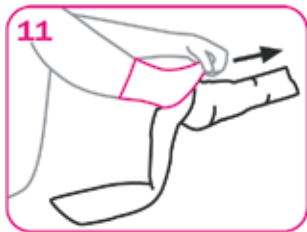


11 Nu kan De let trække strømpen over hælen og fodryggen i retning mod spidsen af foden
Når De har taget kompressionsstrømpen af, befinder **Mediven® 2 in 1** sig inde i strømpen

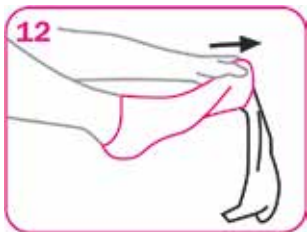

ONEMED

OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109

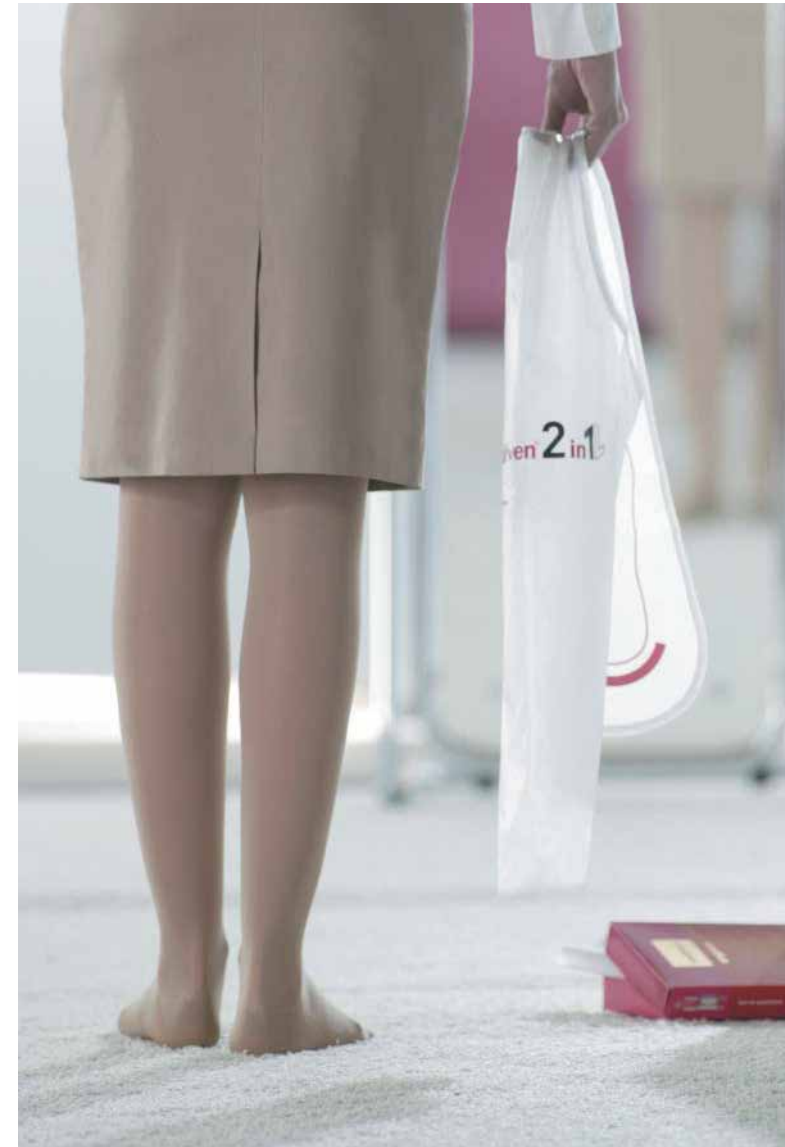


mediven® 2 in 1


Strømpepå- og -aftageren **Mediven® 2 in 1** er specielt tilpasset til kravene for alle brugere af kompressionsstrømper og forenkler to nødvendige procedurer: At få kompressionsstrømperne over fodryggen og hælen på en let måde både ved påtagning og aftagning

Vaskeanvisning:


Hjælpe midlet **Mediven® 2 in 1** kan uden problemer vaskes med andet tøj i vaskemaskinen på skåneprogram op til 40 grader
Brug hverken kemiske rensmidler eller pletfjerner til rengøringen
Lad **Mediven® 2 in 1** lufttørre
Varmekilder som ovne eller radiatorer skal undgås
Brug ikke tørretumbler

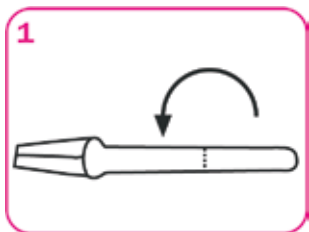


Læg **Mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages på
Den lange ende på **Mediven® 2 in 1** foldes langs med den stiplede linie

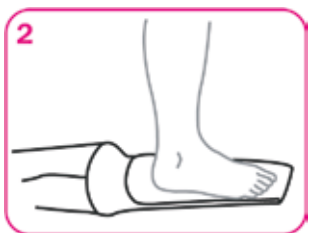



Den nøgne fod sættes på **Mediven® 2 in 1**
I den forbindelse skal tæerne pege i retning mod den omslåede kant
Vær opmærksom på, at der både foran ved tæerne og bagtil ved hælen ligger tilstrækkeligt med stof (min. 3 cm.)

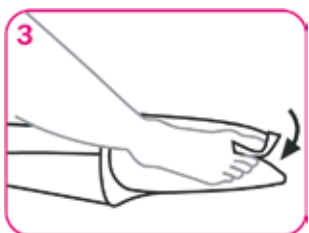


Skub stoffet let ind mellem Deres tæer, for at holde fast på stoffet

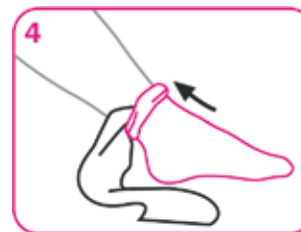


Træk strømpen på over fodryggen og hælen i retning mod knæet
Mediven® 2 in 1 bliver i strømpen og rager ud bagtil ved læggen

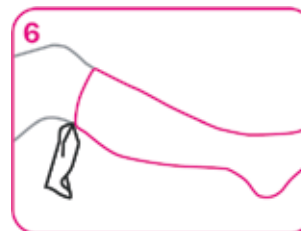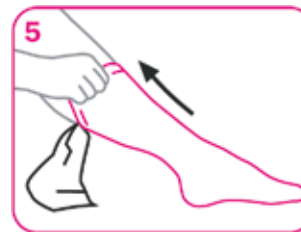

Træk strømpen op til ca. en håndsbredde under knæet Herefter er det let at trække **Mediven® 2 in 1** ud

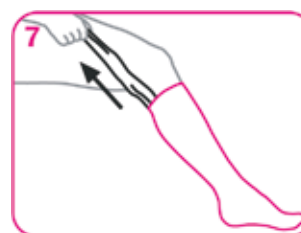

Til det formål tager De fat i den del af **Mediven® 2 in 1**, som stadig stikker ud af strømpen, og løfter hælen noget
Nu kan De let og uden større kraftanstrengelse trække **Mediven® 2 in 1** ud af Deres kompressionsstrømpe eller strømpebukse

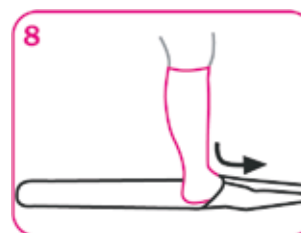

Læg **Mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages af