

# Butler metalstativ






## - Brugsanvisning





### Påtagning:

- 1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
- 2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjlen med strømpeåben vendt fremad
- 3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
- 4) Før strømpen ned over bøjlen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjlen
- 5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.

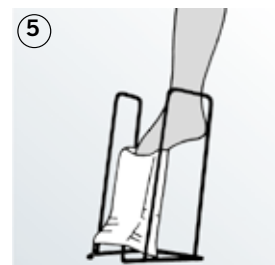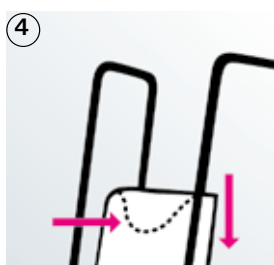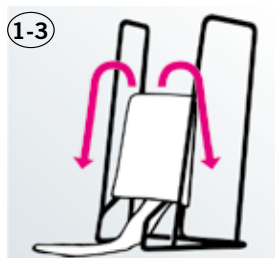

- 6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
- 7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
- 8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra strømpen
- 9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten

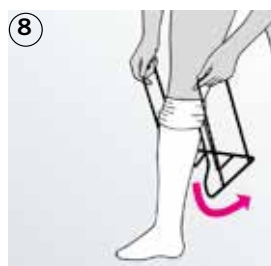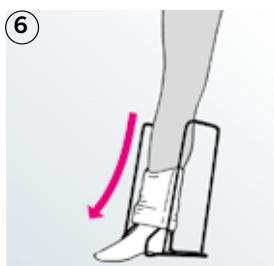

# Butler metalstativ



## - Mål

### Butler metalstativ **(A)**

Mellem håndtagene bagerst = 24 cm.  
Mellem håndtagene forrest = 19 cm.  
Højde **(A1)** = 32 cm.  
Bredde **(A2)** = 24,5 cm.  
Dybde **(A3)** = 19 cm.

Bredde strømpeareal **(A4)** = 10 cm.

Vægt: 750 gram

### Butler metalstativ **XXL (B)**

Mellem håndtagene bagerst = 30 cm.  
Mellem håndtagene forrest = 26 cm.  
Højde **(B1)** = 45 cm.  
Bredde **(B2)** = 31 cm.  
Dybde **(B3)** = 19 cm.

Bredde strømpeareal **(B4)** = 14 cm.

Vægt: 1 kg.

