

Butler metalstativ m/lange håndtag



- Brugsanvisning



Påtagning:

- 1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
- 2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjlen med strømpetåen vendt fremad
- 3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
- 4) Før strømpen ned over bøjlen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjlen
- 5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.


1-3



4




5

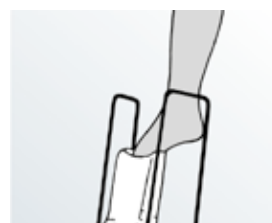

- 6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
- 7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
- 8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra strømpen
- 9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten


6

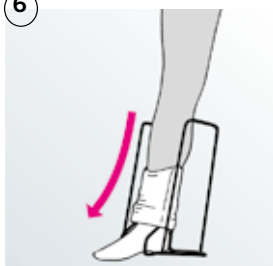

7



8

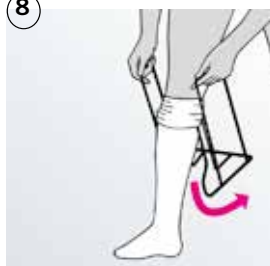

9



Butler metalstativ m/lange håndtag



- Mål

Butler metalstativ med lange håndtag

Mellem håndtagene bagerst = 24 cm.

Mellem håndtagene forrest = 21 cm.

Højde A1 = 34,5 cm.

Bredde A2 = 24,5 cm.

Dybde A3 = 17 cm.

Bredde strømpeareal A4 = 10 cm.

Vægt: 800 gram

