

# Butler metalstativ m/variable håndtag **ONEMED**


## - Brugsanvisning



### Påtagning:

- 1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
- 2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjljen med strømpetåen vendt fremad
- 3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
- 4) Før strømpen ned over bøjljen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjljen
- 5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.

①-③

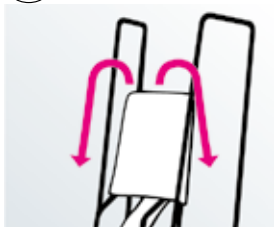

④




⑤



- 6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
- 7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
- 8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra strømpen
- 9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten


⑥

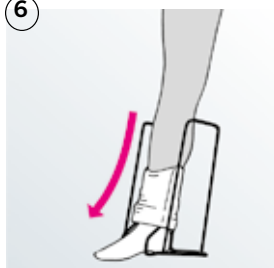

⑦



⑧

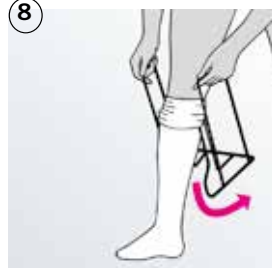

⑨



# Butler metalstativ m/variable håndtag **ONEMED**

## - Mål

---

### Butler metalstativ med variable håndtag

Mellem håndtagene bagerst = 22 cm.

Mellem håndtagene forrest = 19 cm.

Højde **A1** = 27-59 cm.

Bredde **A2** = 24 cm.

Dybde **A3** = 17 cm.

Bredde strømpeareal **A4** = 10 cm.

Vægt: 1,25 kg.

