

# Butler metalstativ til armstrømper



## - Brugsanvisning



### Påtagning:

- 1) Placér strømpepåtageren på et skridsikkert underlag (f.eks. Posey skridsikkert underlag)
- 2) Rul armstrømpen med vrangen ud over den halvrunde cylinder - sørg for, at sømmen ikke løber mod midten, men at den flyttes lidt
- 3) Læg stativet ned - Til stabilisering lægges den forreste vinkel an mod bordkanten (armstrømper til højre arm mod højre og armstrømper til venstre arm mod venstre)



- 4) Før armen ensartet - uden at dreje den - ind i armstrømpen
- 5) Kontrollér endnu en gang, at armstrømpen sidder korrekt og smøg evt. silikonebåndet eller lignende op



Kan rengøres med almindelige rengørings- eller desinfektionsmidler

# Butler metalstativ til armstrømper **ONEMED**

## - Mål

### Butler metalstativ til armstrømper M (A)

Højde/længde (A1) = 25 cm.

Bredde (A2) = 24 cm.

Dybde (A3) = 22 cm.

Bredde strømpeareal (A4) = 11 cm.

Vægt: 700 gram

### Butler metalstativ til armstrømper L (B)

Højde/længde (B1) = 25 cm.

Bredde (B2) = 26 cm.

Dybde (B3) = 22 cm.

Bredde strømpeareal (B4) = 12,5 cm.

Vægt: 700 gram

