

Smørende Deodorant

Stomipleje



Coloplast A/S
Høfvedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning

23325879 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S.

Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-01-26

Tilsliget formål

Brava Smørende Deodorant er beregnet til at deodorisere og smøre indholdet i en stomipose.

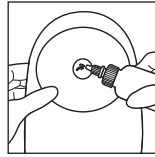
Forbehold

Bør ikke udsættes for sollys.

InformationIndholdsstoffer:

Vand, cocamidopropylbetain, hydroxypropylguar, duftstof, tetranatrium-EDTA, imidiazolidinylcarbamid, citronsyre.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Sådan anvendes

Tilsæt 5-10 ml eller et brev i posen, og gnid forsigtigt på posen for at fordele Brava Smørende Deodorant jævnt ud.

Tilpas mængden efter størrelsen af din stomipose.



Hvis du bruger en åben pose, kan du også tilsætte deodorant gennem åbningen.

Gentag efter tømning af posen.

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller i henhold til lokale retningslinjer.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler

Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage