

## Mepilex® Border Post-Op

Selvkliæbende kirurgisk bandage af blød silikone



### Produktbeskrivelse

Mepilex Border Post-Op er en selvkliæbende bandage, der absorberer blødeskudat og minimerer risikoen for maceration. Det udvendige vandtætte lag beskytter såret mod snavs og bakterier. Bandagen har et Safetac® sårkontaktlag, som er en unik klæbeteknologi. Det minimerer smerte hos patienterne og traume mod såret og den omkringliggende hud ved bandageskift.

Mepilex Border Post-Op består af:

- En fleksibel, absorberende pude med to lag. Et nonwoven spredningslag og et lag med superabsorberende fibre
- En transparent filmbagside, der er åndbar, men vandtæt, og som udgør en barriere over for udefra kommende urenheder
- Et sårkontaktlag bestående af blød, selvkliæbende silikone (Safetac) og et bærende lag af film

### Materialeindhold:

Silikone, polyurethan, viskose, polyester, polyolefiner, polyakrylat og superabsorberende akrylatfibre.

### Anvendelsesområde

Mepilex Border Post-Op er en selvkliæbende, absorberende kirurgisk bandage, der er beregnet til væskende sår. Den er beregnet til akutte sår, såsom kirurgiske sår, snitsår og hudafskrabninger.

### Forholdsregler

- Hvis der iagttages tegn på infektion, f.eks. feber eller at såret bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsfagligt personale vedrørende passende behandling.
- Konsulter altid sundhedsfagligt personale før anvendelse af Mepilex Border Post-Op på patienter med epidermolysis bullosa.
- Mepilex Border Post-Op må ikke anvendes til patienter og/eller brugere med kendt overfølsomhed over for de materialer/bestanddele, der indgår i produktet.

- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage (sterile barriere) er beskadiget eller har været åbnet før brug. Må ikke resteriliseres.



### Brugervejledning

Mepilex Border Post-Op kan anvendes af lægpersoner under sundhedsfagligt tilsyn.

1. Rens såret og den omkringliggende hud i overensstemmelse med klinisk praksis.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Mepilex Border Post-Op sårpudden skal overlappes såret med mindst 1-2 cm, således at den omkringliggende hud beskyttes mod maceration, og bandagen sidder godt fast.
4. For bandager med tre stykker bagsidefilm skal det midterste stykke bagsidefilm fjernes først. Sæt den klæbende side på såret, så bandagen kan fikseres. For bandager med to stykker bagsidefilm tages fat i begge stykker overlappende bagsidefilm, så klæbeoverfladen blottlægges, og bandagen kan fikseres.
5. Undgå folder, mens de resterende stykker bagsidefilm forsigtigt fjernes. Begynd med den længste del. Stræk ikke bandagen under appliceringen.

Mepilex Border Post-Op kan blive siddende i op til syv dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, eller i henhold til klinisk praksis.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke i forbindelse med Mepilex Border Post-Op skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.