

RENGØRINGSVEJLEDNING - Baxter ExactaMed Oral/Enteral sprøjte

Rengør sprøjten straks efter anvendelse ved at følge trin 1 til 8



1. Vask hænder.



2. Fyld en ren skål eller vask med varmt sæbevand (normalt opvaskemiddel).



3. Placer sprøjtespidsen i vandet. Træk stemplet ind og ud flere gange, indtil alle spor af indhold eller lægemiddel er fjernet.



4. Adskil stempel og sprøjte og vask i sæbevandet.



5. Rengør begge dele under rindende koldt vand.



6. Ryst overskydende vand af. Aftør forsigtigt sprøjtespidsen med en ren klud for at fjerne overskydende vand i spidsen. Tør efter med en ren klud.



7. Når delene er tørre, opbevares de adskilte i en ren, tør beholder.



8. Saml sprøjten igen før brug.

OBS: Hvis det er nødvendigt efter trin 5, kan dispenserne også behandles i en dampsterilisator, nedsænkes i en kold steriliserende opløsning eller nedsænkes i kogende vand (i 3 minutter).

Bemærk venligst: ExactaMed Oral/Enteral sprøjter er genanvendelige men bør udskiftes hvis:

- Der er synlige skader på sprøjten eller spidsen
- Dosismarkeringerne er utydelige
- Stemplet er beskadiget
- Sprøjten er svær at få til at fungere

I tvivlsspørgsmål, kontakt Baxter A/S

Baxter

Baxter A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
☎ 4816 6400
☎ 4816 6464
www.baxter.dk