

## Urinposeholder til lår 103CE

### Produktbeskrivelse

Urinposeholder er fremstillet i en elastisk Øko-TEX tekstil (95% bomuld og 5% Lycra). **CAD** urinposeholder til lår bæres på højre lår og giver brugeren en komfortabel hjælpebeklædning til at fæstne kateterposen i uden at stramme. Findes i 7 størrelser (se nedenstående størrelsesangivelse). Benposen kan vaskes ved 90°C.

### Brugsanvisning

Placer urinposeholderen på låret. Sørg for at den smalle støtteelastik nederst på poseholderen er placeret lige over knæledet, så knæet fortsat har en fri bøjefunktion. Den brede støtteelastik øverst på urinposeholderen skal sidde sikkert på låret uden at stramme. Herefter placeres kateter-posen i "lommen" på urinposeholderen. Sørg for at aftapningsstudsens føres ud igennem studsåbningen på urinposeholderen, så der er let adgang til efterfølgende at tømme kateterposen for væske.

Når urinposeholderen skal skiftes ud med en ren skal kateterposen blot tages ud af "lommen" først og der kan skiftes til en ny urinposeholder.

Art.nr.	Størrelsesangivelse
103XS	<b>CAD</b> urinposeholder extra small *omkreds på øvre lår: minimum 36 cm, maximum 50 cm *omkreds under lår: minimum 26 cm, maximum 42 cm
103S	<b>CAD</b> urinposeholder small *omkreds på øvre lår: minimum 38 cm, maximum 52 cm *omkreds under lår: minimum 28 cm, maximum 44 cm
103M	<b>CAD</b> urinposeholder medium *omkreds på øvre lår: minimum 40 cm, maximum 58 cm *omkreds på under lår: minimum 30 cm, maximum 46 cm
103L	<b>CAD</b> urinposeholder large *omkreds på øvre lår: minimum 44 cm, maximum 62 cm *omkreds på under lår: minimum 32 cm, maximum 46 cm
103XL	<b>CAD</b> urinposeholder extra large *omkreds på øvre lår: minimum 48 cm, maximum 64 cm *omkreds på under lår: minimum 33 cm, maximum 54 cm
103XXL	<b>Care</b> urinposeholder XXL Omkreds på øvre lår: minimum 52 cm, maximum 68 cm Omkreds på under lår: minimum 34 cm, maximum 56 cm
103XXXL	<b>Care</b> urinposeholder XXXL Omkreds på øvre lår: minimum 56 cm, maximum 72 cm Omkreds på under lår: minimum 36 cm, maximum 58 cm