

Pasta

Udfylder fordybninger/folder

Stomipleje

Sådan anvendes


Forberedelse

For at undgå at forurene pastaen


- Tuben må hverken komme i berøring med vand eller stomi.
- Hænderne skal vaskes grundigt og tørres, når pastaen er påført.

Før pastaen påføres, skal det sikres, at huden omkring stomien er ren og tør.


Påsætning

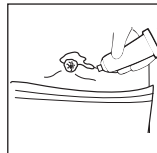

Pastaen kan påføres huden direkte fra tuben for at udjævne dybe hudfolder, ar eller ujævne overflader. Pastaen må ikke påføres hele klæberområdet. Den kan også påføres direkte på klæberen.

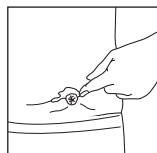

Hvis der er brug for det, udjævnes pastaen ved at glatte den med en spatel eller en fugtig finger.

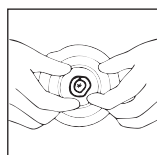

Efter klæberen er sat på, skal det sikres, at den passer perfekt rundt om stomien ved at trykke ovenpå klæberen med fingrene.

Efter brug fjernes pastarester på tuben med en ren serviet. Sæt hæften på tuben igen, og skru den godt fast for at forhindre kontakt med fugt.

Aftagning

Pastaen er let at fjerne med lunkent vand og en vaskeklud. Olierede pastarester kan blive siddende på huden indtil næste påsætning. Det er bedre at efterlade lidt pasta end at risikere at irritere huden ved at skrubbe alle rester af.

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller i henhold til lokale retningslinjer.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.



Brugervejledning

23325796 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-01-22

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
Tlf.: +45 49 11 11 11

Tilsigtet formål

Brava Pasta er beregnet til at udfylde fordybninger/ujævnheder i den intakte hud omkring stomien. Dette danner en tæt tilslutning mellem hud og klæber, og beskytter huden mod output fra stomien.

Forbehold

Dette sterile produkt indeholder råvarer af naturlig oprindelse, og der er risiko for, at materialerne indeholder patogener, som ikke kan fjernes fuldstændigt ved selv de strengeste fremstillingsprocesser. Derfor indebærer brugen af produktet en øget infektionsrisiko for sårbare patientgrupper og bør anvendes med forsigtighed hos for tidligt fødte børn og spædbørn med umodne immunforsvar og spædbørn, der får immunhæmmende behandling.

Kun til udvortes brug.

Bør ikke udsættes for sollys.

Information

Hvis pastaen skiller, skal den vandige del kasseres.

Kassér tuben, hvis pastaen bliver mørk.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Forholdsregler



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage



MR-sikker