

**SenSura<sup>®</sup> Mio**

 **Coloplast**

**SenSura<sup>®</sup> Mio Convex**

Click 2-dels stomipose tømbar

Basisplade

Stomipleje



**Brugervejledning**

23324286 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-10-07  
Velcro<sup>®</sup> tilhører Velcro Industries B.V.

**Erklæret formål**

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

**Indikationer**

Produktet er indiceret til personer med stomi.

**Advarsler**

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

**Forbehold**

For korrekt brug skal du kontakte din sundhedsperson, inden du begynder at bruge et Convex-produkt.

**Information**

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


**Særlige opbevaringskrav**

Opbevar basispladen vandret.


Må ikke udsættes for sollys.

**Anvendelse**


**Forberedelse**

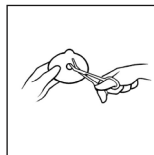


Følg klippeguiden på basispladen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

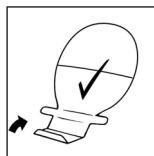


Læg posen på et fladt underlag med koblingen nedad. Luk udløbet ved at folde den nederste del af udløbet op tre gange, indtil Velcro<sup>®</sup>-strimlen bliver synlig.

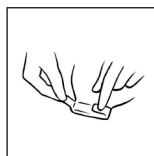

Fold de to turkise ører ind over Velcro<sup>®</sup>en.

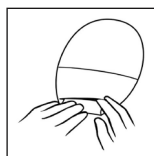

Udløbet kan skjules på to måder. Enten ved hjælp af Velcro<sup>®</sup>-punktet lige over udløbet eller Velcro<sup>®</sup>-punktet midt på posen.

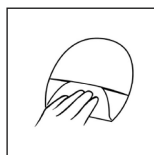

(Det gælder ikke for de transparente poser, hvor der ikke er et Velcro<sup>®</sup>-punkt midt på posen).



Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt tør, inden basispladen påsættes.


**Påsætning**




Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del) og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.




Påsæt basispladen omkring stomien. Pres langsomt klæberen på plads med fingrene. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.

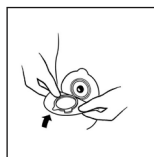


Ved poseskift sørg for, at basispladen er tør og ren (brug kun vand til at rengøre basispladen). Kontroller at låseringen er åben. Placer den nederste del af posens kobling på den nederste del af basispladens kobling.

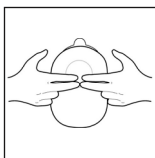

Tryk posen og basispladen sammen i bunden med dine langfingre.

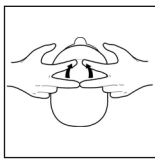


Anbring et let tryk med dine pegefingre på toppen af koblingen, indtil du mærker, at posen er korrekt anbragt på basispladen.

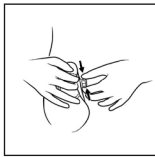


Luk låseringen ved at trykke låsen sammen. Posen er låst sikkert fast til basispladen, når der høres et "klik".

#### Tømning af posen

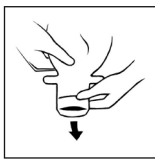

Åbn udløbet og tøm posen ud i toilettet ved behov.

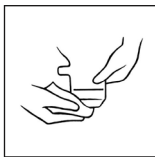


Rens udløbet, for eksempel med toiletpapir. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.


#### Aftagning



Åbn låseringen ved at trykke på den turkise tap, der vender ind mod maven.

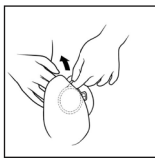

Tag fat i aftagningsøret, og fjern posen ved at trække den forsigtigt af basispladen.

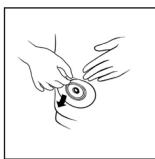

Basispladen aftages langsomt ved at trække i aftagningsøret og fjerne den forsigtigt fra huden. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

#### Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Det må ikke skylles ud i toilettet.

#### Filterlabel



For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

#### Bælte

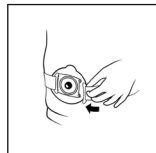

Bruger du bælte, så juster bæltets længde ved at trække i stropperne, så det passer til din krop. Det er ikke nødvendigt at fjerne stofstykket, der dækker spændet. Fastgør bæltets fire kroge i bæltets fire øjne på hver side af basispladen. Start forrest, og læg et let tryk mod maven. Træk derefter bæltets kroge væk fra samlingen, indtil de "klikker" på plads.

(Gælder kun for produkter med bælteører).

#### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

#### Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Varenummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker