

**SenSura<sup>®</sup> Mio**

 **Coloplast**

**SenSura<sup>®</sup> Mio Convex**

2-dels Flex tømbar ileostomipose

Basisplade

Stomipleje



### Brugervejledning

23324331 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-09-24  
Velcro<sup>®</sup> tilhører Velcro Industries B.V.

### Erklæret formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

### Indikationer

Produktet er indiceret til personer med stomi.

### Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

### Forbehold

For korrekt brug skal du kontakte din sundhedsperson, inden du begynder at bruge et Convex-produkt.

### Information

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


### Særlige opbevaringskrav

Opbevar basispladen vandret.


Må ikke udsættes for sollys.

### Anvendelse


#### Forberedelse

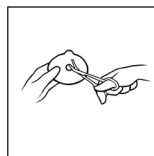


Følg klippeguiden på basispladen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

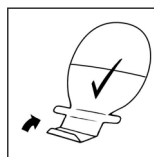


Læg posen på et fladt underlag med koblingen nedad. Luk udløbet ved at folde den nederste del af udløbet op tre gange, indtil Velcro<sup>®</sup>-strimlen bliver synlig.

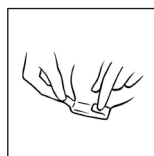


Fold de to turkise ører ind over Velcro<sup>®</sup>en.

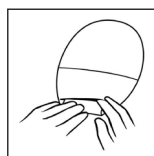

Udløbet kan skjules på to måder. Enten ved hjælp af Velcro<sup>®</sup>-punktet lige over udløbet eller Velcro<sup>®</sup>-punktet midt på posen.

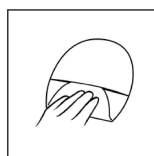


(Det gælder ikke for de transparente poser, hvor der ikke er et Velcro<sup>®</sup>-punkt midt på posen).

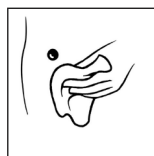


Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt tør, inden basispladen påsættes.

#### Påsætning

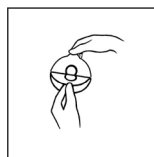

Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del) og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.

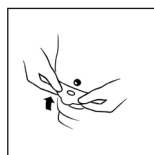


Påsæt basispladen omkring stomien. Pres langsomt klæberen på plads med fingrene. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien.


For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden.

Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.

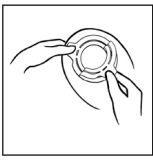

Ved poseskift sørg for, at basispladen er tør og ren (brug kun vand til at rengøre basispladen). Tag beskyttelsesfolien af posens klæbende ring. Undgå at trække i eller strække det klæbende skum på posen.

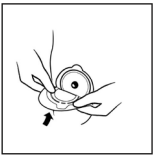


Få bunden af posens kobling til at passe med den turkise linje på basispladens yderkant.



Start fra bunden, og tryk let med fingrene på posen og basispladen, samtidig med at koblingen glattes hele vejen op og rundt om koblingens ring. Det er muligt at flytte posen en enkelt gang lige efter, at den er påsat. Kontrollér, at koblingen er ren, når posen påsættes igen. Husk at lukke åbningen inden brug.

### Tømning af posen

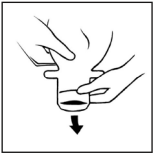

Åbn udløbet og tøm posen ud i toiletet ved behov.




Rens udløbet, for eksempel med toiletpapir. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.

### Aftagning



Hold igen på pladekoblingen med den ene hånd, og fjern langsomt posen ved at tage fat i det turkise aftagningsøre med den anden hånd og træk posen nedad.

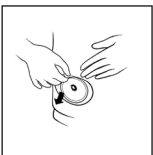


Basispladen aftages langsomt ved at trække i aftagningsøret og fjerne den forsigtigt fra huden. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

### Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Det må ikke skylles ud i toiletet.

### Filterlabel

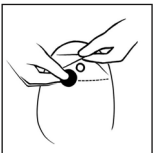

For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

### Bælte

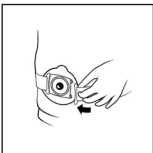

Bruger du bælte, så juster bæltets længde ved at trække i stropperne, så det passer til din krop. Det er ikke nødvendigt at fjerne stofstykket, der dækker spændet. Fastgør bæltets fire kroge i bæltets fire øjne på hver side af basispladen. Start forrest, og læg et let tryk mod maven. Træk derefter bæltets kroge væk fra samlingen, indtil de "klikker" på plads.

(Gælder kun for produkter med bælteører).

### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

### Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Varenummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker