

# Brava®

Elastisk Kantsikring,  
Buét  
Elastisk Kantsikring  
XL  
Elastisk Kantsikring,  
Buét Extra  
Elastisk Kantsikring,  
Rektangulær



## Brugervejledning

23322560 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.© 2019-10-28



## Tilsigtet brug

Brava Elastisk Kantsikring er beregnet til at støtte kanten af basispladen/klæberen ved at yde ekstra klæbeevne på den intakte peristomale hud.

## Indikationer

Brava Elastisk Kantsikring er indiceret til personer, der anvender stomipose og basisplade/klæber.

## Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe at skade produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

## Forholdsregler

Skal beskyttes mod sollys, da dette kan påvirke produktets kvalitet.

Produktet må ikke strækkes ved påsætning, da dette kan påvirke dets ydeevne.

## Information

Produkt til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brugen, da æsken beskytter produkterne. Mærkaten på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. partinummer, udløbsdato og en unik strejkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

## Særlige opbevaringskrav

Må ikke udsættes for sollys.

Produktet skal opbevares horisontalt.


## Anvendelse

### Sådan åbnes æsken

Tag fat i den turkise flap, og træk tilbage for at åbne æsken. Riv ikke flappen itu; den skal bruges til at lukke æsken igen.

### Påsætning


#### Elastisk Kantsikring, Buét Elastisk Kantsikring XL

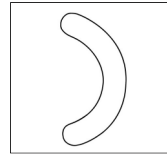


Fjern det ene stykke dækpapir, før kantsikringen sættes på.

Anbring kantsikringen, hvor det ønskes på klæberen, og hvor du har brug for støtte. Husk, at en del af klæberen skal dækkes af kantsikringen.

Produktet må ikke strækkes under påsætning.

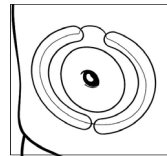


Fjern det andet stykke dækpapir, og stryg kantsikringen fast på huden. Gentag eventuelt.

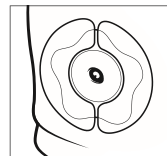

Elastisk Kantsikring XL kan også bruges sammen med SenSura® Mio Concave.

### Påsætning


#### Elastisk Kantsikring, Buét Extra

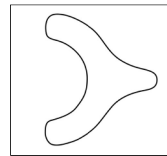

Fjern det ene stykke dækpapir, før kantsikringen sættes på.

Anbring kantsikringen, hvor det ønskes på klæberen, og hvor du har brug for den ekstra støtte. Husk, at en del af klæberen skal dækkes af kantsikringen.


Produktet må ikke strækkes under påsætning.

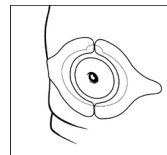

Fjern det andet stykke dækpapir, og stryg kantsikringen fast på huden. Gentag eventuelt.

### Påsætning


#### Elastisk Kantsikring, Rektangulær

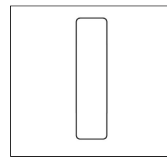

Fjern det ene stykke dækpapir, før kantsikringen sættes på.

Anbring kantsikringen, hvor det ønskes på den firkantede klæber, og hvor du har brug for støtte. Husk, at en del af klæberen skal dækkes af kantsikringen.

Produktet må ikke strækkes under påsætning.

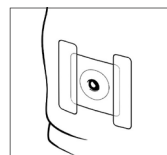

Fjern det andet stykke dækpapir, og stryg kantsikringen fast på huden. Gentag eventuelt.

Du kan bruge kantsikring hvor som helst, du synes, der er brug for at forstærke klæberen i kanten.

## Fjernelse af kantsikringen

Kantsikringen kan fjernes sammen med klæberen. Om nødvendigt løsnes kantsikringens kanter, hvorefter den strækkes forsigtigt for at fjerne den.

### Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

### Forklaring på symboler



Indikerer, at varen er medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr.



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Global Trade Item Number



Bør ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage