

Klar-til-brug overfladebehandlet kateter til kvinder



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning

23316658 Version 3

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes, ©

2015-01-07

Indikationer

Sterilt urinkateter til engangsbrug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Katetret ligger i en steril saltvandsopløsning. Opløsningen er ufarlig, men kan give pletter på tøjet.

Forbehold

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget
Må ikke udsættes for sollys.

Selvkateterisation med et kateter må kun foretages efter lægeordination og efter grundig oplæring. Følg altid vejledningen.

Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du:

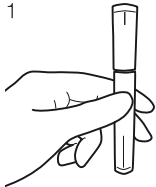
- får en urinvejsinfektion med symptomer som feber, ubehag efter tømning af blære, hyppig vandladningstrang eller blod i urinen.

Advarsler

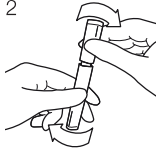
Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Sådan anvendes produktet

Åbning / klargøring af produktet

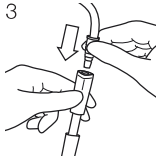
- 

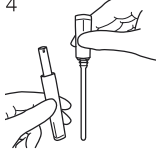
Begynd med at vaske hænderne og området omkring urinrørsåbningen.

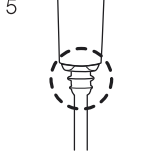
Hold produktet opret, så håndtaget (den brede ende) peger opad (1).
- 

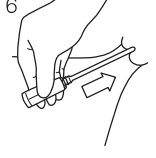
Åbn produktet ved at dreje håndtaget i en vilkårlig retning, så emballagen brydes. Du ved, at produktet er ubrugt, når du mærker, at håndtaget knækkes fri af hylstret (2).

Træk håndtaget ca. 2 cm opad, indtil du mærker en modstand.

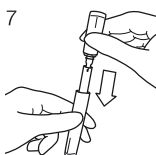
I denne position kan der efter behov sættes en urinpose* på enden af håndtaget.
- 

Sæt urinposens konektor ind i åbningen øverst på håndtaget. Sørg for, at samlingen er forsvarligt fastgjort (3).
- 

Åbn produktet helt ved at fortsætte med at trække håndtaget lige opad, indtil hele det sterile kateter er synligt. Det er vigtigt, at katetret ikke vipper under åbningsprocessen (4).
- 

De to ringe under håndtaget skal være synlige for at sikre, at katetret er helt fastlåst og klar til brug (5).
- 

Indføring af katetret

Før forsigtigt katetret ind i urinrøret, indtil urinen begynder at flyde (6).
- 

Fjernelse af katetret

Når urinen holder op med at flyde, trækkes katetret ud et lille stykke ad gangen for at sikre, at blæren tømmes helt. Fjern langsomt katetret, når der ikke kommer mere urin ud.

Produktet kan lukkes igen med henblik på transport og bekvem bortskaffelse ved at skubbe katetret helt ind i hylstret (7).

Hvis der er tilsluttet en urinpose, skal den fjernes, før produktet kan lukkes korrekt.

Bortskaffelse af produktet

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det må ikke skylles ud i toiletet.

*Produktet kan anvendes sammen med urinposer, der har en konektor med en diameter på højst 8,5 mm ved spidsen.