


1


Placér Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide hen over foden.

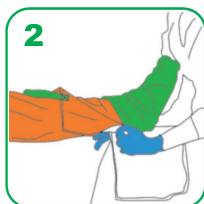

2


Klik magneterne sammen på SlideX og placér SlideX på langs som følger, foran på benet:

- den lange side er under (på over- og underbenet), den korte side er over;
- vend den nederste kant rundt om anklen således at SlideX falder ind i Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide;
- stroppen ligger oven på patientens knæ.

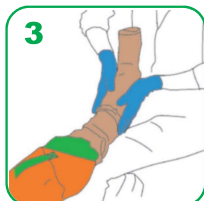


3

Skub strømpen over Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide på normal vis indtil strømpens hæl sidder i den rigtige position.

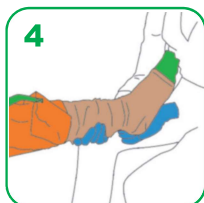

4

Skub strømpen i en jævn bevægelse fra Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide over SlideX længere op mod knæet indtil ca. 2 cm under bunden af knæskallen.

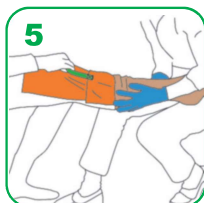

5

Patienten kan hjælpe, så snart kanten af den elastiske strømpe ligger på SlideX, ved at trække i stroppen, mens plejeren fortsætter med at skubbe strømpen hen over benet.

STØRRELSESANVISNING

Vare nummer	Størrelse	Diameteren af de ben
E01520	Medium	< 20 cm
E01521	Large	> 20 cm

INTRODUKTION

SlideX er specifikt designet til at reducere de problemer der opleves, når man tager kompressionsstrømper, og især strømpebukser, af og på. Støttemidlet kan anvendes til kompressionsstrømper med åben og lukket tå i kombination med en Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide. Produktet er fremstillet af glat materiale, som er behandlet med en særlig belægning. Disse kvaliteter skaber et glat hjælpemiddel, som reducerer friktionen betydeligt, når man tager strømper af og på. Reduktionen af friktion på SlideX hjælper med at minimere den fysiske belastning, som ellers opleves af plejere og patienter. Med tydelige og enkle brugsanvisninger kan plejere tage kompressionsstrømper af og på ganske bekvemt.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER

- Universelle Slide Solution-produkter
- Reduktion af fysisk belastning for både plejer og patient
- Strømperne bevarer den terapeutisk graderede kompression i længere tid
- Forøger behandlingseffektivitet

Benyt kun den enkelte Slidex til én patient. Hvis Slidex benyttes til flere personer, skal den rengøres i en 70% ethanol opløsning.

VASKEANVISNING

- Slidex må kun vaskes i hånden ved lav temperatur (60°C)
- Tør påtageren med et håndklæde – må ikke stryges
- Må ikke renses kemisk eller bleges
- Udsæt ikke påtageren for stærke varmekilder f.eks. direkte sollys, tændte radiatorer el.lign



VIGTIGT

- Advarsel! Træd ikke på Slidex, da man let kan glide på det glatte materiale.
- Advarsel! Slidex indeholder flere magneter, hold derfor dette produkt på afstand af pacemakere og defibrilatorer. Det magnetiske felt kan forstyrre funktionen af disse apparater (minimumsafstand = 30 cm).
- Ved brugen af Slidex er det vigtigt at bruger den rigtige størrelse. Ved brug af en forkert størrelse vil påtageren ikke fungere optimalt, gå i stykker eller slides hurtigt.
- Benyt specielle gummihandsker ved brug af Slidex. Gummihandskerne giver et optimalt greb på strømpen og mindsker den fysiske belastning.
- Dette produkt er omfattet af en garanti på seks måneder fra købsdatoen. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Opstår der reklamationer i garantiperioden, som kan henføres til materiale og/eller produktionsfejl, erstattes produktet gratis. Ombytning sker kun mod forevisning af gyldig kvittering, hvor det kan påvises, at klagen indgives indenfor garantiperioden.
- Garantien bortfalder, hvis defekten er opstået på grund af forkert brug eller hvis påtageren er blevet brugt på flere patienter. Kontakt venligst din forhandler for at benytte garantien. Inden returnering bedes produktet vaskes efter de tidligere anførte vaskeforskrifter.