

Pulver

Stomipleje

**Brugsanvisning**

23325147 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©  
2020-12-16

Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark  
Tel: +45 49 11 11 11

**Erklæret formål**

Pulveret er beregnet til absorbering af fugt på ubeskadiget, peristomal hud.

**Forholdsregler**

Dette sterile produkt indeholder råmaterialer af naturlig oprindelse, og der er risiko for, at materialerne indeholder patogener, som ikke kan fjernes fuldstændigt under selv de mest stringente produktionsprocesser.

Derfor indebærer brug af produktet en øget risiko for infektion hos sårbare patientgrupper, og det bør anvendes med forsigtighed hos babyer og spædbørn med uudviklet immunforsvar eller spædbørn, som får immunundertrykkende behandling.

**Information**

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

**Særlige opbevaringskrav**

Pulveret opbevares tørt og køligt og må ikke udsættes for direkte sollys.

**Forberedelse**

1. Vask og tør huden omkring stomien.

**Påsætning**

2. Åbn låget og vend flasken mod det tilsigtede område.
3. Ryst eller klem forsigtigt på flasken og drys pulveret over den tilsigtede, ubeskadigede hud.
4. Brug gaze til at fordele pulveret jævnt.
5. Tør overskydende pulver af, før du påsætter den klæbende stomibasisplade eller stomipose.
6. Luk låget tæt efter brug og opbevar på et køligt, tørt sted.

**Bortskaffelse**

Produktet skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller i henhold til lokale retningslinjer.

Produktet må ikke skylles ud i toiletet.

**Indberetning af utilsigtede hændelser**

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

**Forklaring på symboler**

Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato  
(ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-  
varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage