

**SenSura<sup>®</sup>Mio**

**Coloplast**

**SenSura<sup>®</sup>Mio**  
**Convex**

1-dels lukket kolostomipose  
Stomipleje



**Brugervejledning**

23316386 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ©

Velcro® tilhører Velcro Industries B.V.

2015-03-09

**Indikationer**

Stomiposen er beregnet til at opsamle output fra stomien. Klæberen er beregnet til at fiksere posen og klæbe på intakt hud omkring stomien.

**Information**

Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold – må ikke nedfryses.

Lad produktet opnå stuetemperatur, inden det påsættes.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

**Forbehold**


Tal med stomisygeplejersken, inden du begynder at bruge et konveks produkt.

**Advarsler**

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

**Anvendelse**

**Forberedelse**

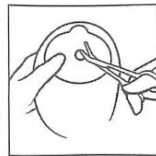


Følg klippeguiden på klæberen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.



Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren, inden klæberen påsættes.

**Påsætning**

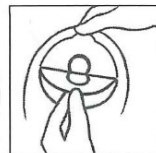

Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre (på den klæbende del) og træk i den turkise afmærkning på beskyttelsesfolien.



Tilpas den klæbende overflade omkring stomien og tryk den godt fast på huden. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.



Tryk på posen omkring stomien for at sikre, at posen sidder godt fast.

**Aftagning**




Posen fjernes langsomt og forsigtigt ved at trække i aftagningsøret på klæberen. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

**Bortskaffelse**


Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det må ikke skylles ud i toiletlet.

**Filterlabel**

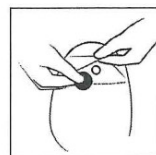

For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

**Bælte**

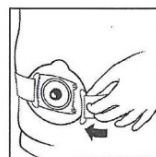

Bruger du bælte, så juster bæltets længde ved at trække i stropperne, så det passer til din krop. Det er ikke nødvendigt at fjerne stofstykket, der dækker spændet. Fastgør bæltets fire kroge i bæltets fire øjne på hver side af basispladen. Start forrest, og læg et let tryk mod maven. Træk derefter bæltets kroge væk fra samlingen, indtil de "klikker" på plads. (Gælder kun for produkter med bælteører).

