

Flocath Quick

da

Kære Teleflex-kunde

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og vær opmærksom på illustrationerne bagerst i denne brochure.

Flocath Quick er et sterilt, brugsklart, fleksibelt PVC-kateter til tilbagevendende kateterisering. Kateteret er hydrofilbelagt (Hydrogel) og har en integreret pose med 0,9 % steril saltvandsopløsning. Det leveres i vandtæt emballage for at sikre fuld aktivering af den hydrofile belægning.

Indikationer

Tilbagevendende kateterisering (f.eks. neurogen blæredysfunktion)

Kontraindikationer

- Uoverstigelige urethrale obstruktioner
- Urethrale læsioner
- Urethral inflammation

Specielle karakteristika

Den hydrofile belægning sikrer at, **Flocath Quick** let glider ind i urethra efter at være aktiveret med den sterile 0,9 % saltvandsopløsning.

Den unikke beskyttende katetermuffe letter korrekt aseptisk kateteriseringsteknik.

Mulige komplikationer

Beskadigelse af urethra, blødning i urethra, kateterassocierede urinvejsinfektioner

Levering

Hvert kateter leveres sterilt emballeret med en integreret pose med 0,9 % steril saltvandsopløsning. Der er 30 kateterer i hver æske. Produkterne er garanteret sterile, medmindre pakningen har været åbnet eller ikke er intakt, dog ikke længere end udløbsdatoen, der er anført på etiketten.

Opbevaringsanvisninger

Holdes væk fra sollys og holdes tør. Må ikke bruges, hvis produktets sterilisationsbarriere eller emballage er kompromitteret.

Herudover påkrævet

En egnet antiseptikum

2

Genbearbejdning af medicinske anordninger, der kun er beregnet til engangsbrug, kan resultere i nedsat ydelse eller tab af funktionalitet. Genbrug af medicinske engangsanordninger kan medføre eksponering for virale, bakterielle, svampe- eller prionbaserede patogener. Validerede rengørings- og steriliseringsmetoder og vejledning i genbearbejdning til de oprindelige specifikationer findes ikke til disse medicinske anordninger. Dette produkt er ikke beregnet til at blive rengjort, desinficeret eller steriliseret.

Intermitterende kateterisering

- 1 Vask først dine hænder grundigt, før du rengør det genitale område. Det anbefales at bruge et velegnet antiseptisk middel til at desinficere den urethrale meatus og det omgivende område.
- 2 Fold, og tryk på posen med 0,9 % saltvandsopløsningen, indtil den brister uden at åbne den sterile pakning. Når posen er bristet, og 0,9 % saltvandsopløsningen er tømt ud, vendes hele pakningen op og ned to eller tre gange for at sikre, at hydrofilbelægningen på kateteret er gennemvædet.
- 3 Hæng kateterpakken op i emballagehullet eller det selvklæbende stykke. Den hydrofile belægning kræver mindst 30 sekunders vædning til fuld aktivering.
- 4 Åbn pakningen over en længde på ca. 10 cm ved de punkter, der er markeret med pile.
- 5 Tag det sterile kateter ud af pakningen ved hjælp af den blå beskyttende katetermuffe. Hold kateteret i tragten, og skyd den blå beskyttende katetermuffe mod kateterspidsen, mens du sørger for ikke at berøre kateterskaffet med dine fingre. Kateteriser efter lægens eller sygeplejerskens anvisning.