

2-delt stomipose, åben

Basisplade til stomi

Stomi

**Brugervejledning**

23325542 Version 1 Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-01-15

**Erklæret formål**

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

**Indikationer**

Produktet er beregnet til personer med stomi.

**Advarsler**

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

**Forbehold**

Spørg din sundhedsperson om korrekt brug, før du begynder at bruge et Convex-produkt.

Stomiposen er mærket som ikke MR-sikker, da dens lukkeklemme indeholder metal. Posen eller metalklemmen skal fjernes før MR-scanning.

Dette usterile produkt indeholder råmaterialer af naturlig oprindelse, og der er risiko for, at materialerne indeholder patogener, som ikke kan fjernes fuldstændigt under selv de mest stringente produktionsprocesser. Derfor indebærer brug af produktet en øget risiko for infektion hos sårbare patientgrupper, og det bør anvendes med forsigtighed hos babyer og spædbørn med uudviklet immunforsvar eller spædbørn, som får immunundertrykkende behandling.


**Information**

Stomipose til engangsbrug.


Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


Opbevar basispladen vandret.

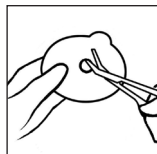**Sådan anvendes****Forberedelse**


Følg klippeguiden på basispladen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

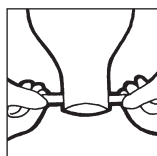

Fjern en klemme fra arket og fjern beskyttelsespapiret. Anbring klæbesiden nede ved åbningen. Hvis klemmen ikke påsættes korrekt den første gang, skal den fjernes og flyttes. Fold op til 4-5 gange, idet du arbejder mod huden, og fold derefter klemmeenderne tilbage. Med en hård klemme er det kun nødvendigt at folde posen en gang, før klemmen lukkes.

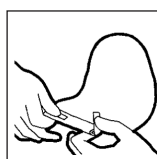


Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt tør, inden basispladen påsættes.

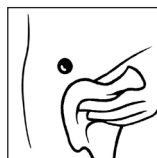**Påsætning**


Placer tommelfingeren på aftagningsøret (på den klæbende del) og træk i det andet øre på beskyttelsesfolien.



Placer basispladen omkring stomien, og tryk på basispladen for at sikre, at den hurtigt klæber fast, og at der opnås en perfekt pasform mellem den klæbende overflade og huden omkring stomien. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.

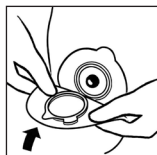

Ved poseskift sørg for, at basispladen er tør og ren (brug kun vand til at rengøre basispladen). Kontroller at låseringen er åben. Placer den nederste del af posens kobling på den nederste del af basispladens kobling.

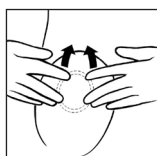


Tryk posen og basispladen sammen i bunden med dine langfinger.



Luk låseringen ved at trykke låsen sammen. Posen er låst sikkert fast til basispladen, når der høres et "klik".

#### Sådan tømmes posen

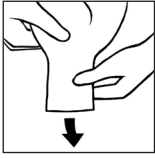

Åbn udløbet og tøm posen ud i toiletet ved behov.



Rens udløbet, for eksempel med toilettejp. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.


#### Aftagning



Fjern posen ved at åbne låseringen og trykke på den lille tap med en fingerspids.



Tag fat i aftagningsøret, og fjern posen ved at trække den forsigtigt af basispladen.

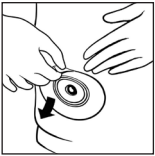

Basispladen aftages langsomt ved at trække i aftagningsøret og fjerne den forsigtigt fra huden. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

#### Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

#### Filterlabel



For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

#### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

#### Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



Ikke MR-sikker