


# Brugsanvisning

## Beskrivelse

Adapt Cera Ring

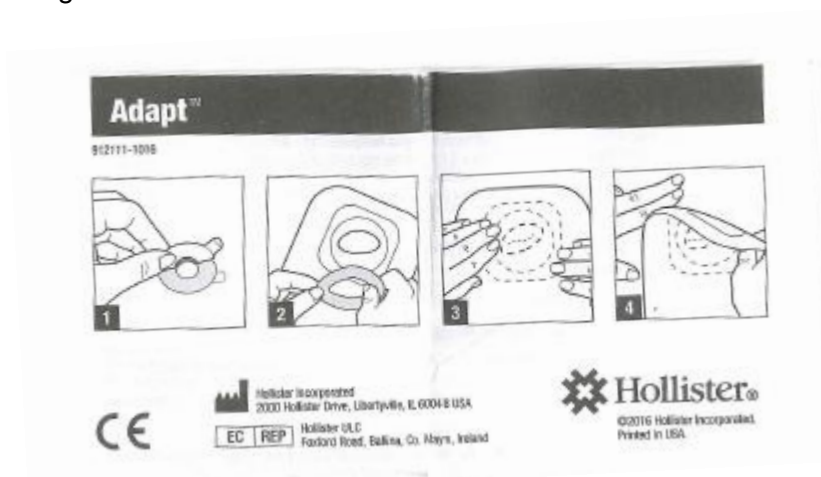

## Brugsanvisning for Adapt Barriere Ringe

Adapt barriere ringe kan anvendes under hudplader og i forbindelse med pasta. Huden skal være ren og tør før påsætningen.

1. Beskyttelsesfilmen på begge sider kan fjernes samtidigt, evt. kan den ene blive siddende under påsætningen.
2. Form og stræk barriere ringen som ønsket, før den sættes på hudpladen. For at barriere ringen kan strækkes, skal beskyttelsesfilmen på begge sider fjernes.
3. Placer hudpladen og barriere ringen korrekt omkring stomien og giv den håndvarme nogle sekunder.

### Aftagning:

4. Trækkes forsigtigt af huden i nedadgående retning, mens der samtidig trykkes let mod den omgivende hud.

INDHOLDSSTOFFER: PRODUKT ET ER FREMSTILLET AF HYDROKOLLODIKLÆBER OG POLYMER/CO-POLYMERPLASI

## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
944905	Adapt CeraRing, Ø48mm 2,3mm slim	10 stk	8815
944904	Adapt CeraRing, Ø48mm 4,5mm standard	10 stk	8805

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2017)