

Brava[®]



Renseserviet til hud

Lad huden tørre, før du påsætter klæberen/produktet.

Luk pakningen igen for at holde Brava Renseservietterne fugtige.

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller i henhold til lokale retningslinjer.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

Sammensætning

Polyetylenterephthalat/viskose (serviet), vand, dexpanthenol, natriumcitrat, citronsyre, natriumgluconat, konserveringsmidler.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.



Brugervejledning

23327591

Version 1 Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-04-29

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (AAAA-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (AAAA-MM-DD)



Fabrikant



Se brugervejledning



Indikerer en stregkode, som indeholder en unik udstyrsidentifikationskode



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage

Tilslaget formål

Brava Renseserviet til hud er beregnet til rensning af intakt hud inden for stomi- og kontinenspleje.

Advarsler

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Forholdsregler

Kun til udvortes brug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Sådan anvendes

Åbn pakningen ved at trække i det turkise aftagningsøre. For at kunne lukke pakningen igen skal du ikke trække den genlykkelige film helt af.

Træk en Brava Renseserviet ud.

Brug servietten til at rense huden. Anvend så mange servietter, som du har brug for.