

da Brugervejledning

SPIRO TALEVENTIL **REF** 710 + 710R + 711

Kun en-patients brug

TALEVENTILEN er en ensretter-ventil som kun åbnes ved inhalation. Udåndings passagen SKAL VÆRE ÅBEN. Sikr at brugeren kan tolerere en ikke-cuffet tube og at der ikke forefindes omfattende mængder af sekret, stenose eller andre forhindringer. Målinger af trykket i lufrøret ved passiv udånding, med Taleventilen anbragt, anbefales at være < 5 cm H₂O.



VIGTIGT! TALEVENTILEN MÅ ALDRIG BENYTTES I KOMBINATION MED EN CUFFET TUBE UDEN FENESTER, DA PATIENTEN I SÅ TILFÆLDE VIL VÆRE UDE AF STAND TIL AT EKSHALERE!

KONTRAINDIKATIONER: Enheden er ikke beregnet til patienter med respiratoriske infektioner, stor slimdannelse, stenose, paralyse af stemmebånd eller akutte luftvejsobstruktioner. Enheden er ikke beregnet til anvendelse sammen med inline-ventilatorer, endotracheale ventiler eller andre kunstige luftveje.

HÆTTEN (5) leveres med et konisk område, som sidder i ventilens **HOLDER (3)** mens den bruges. Jo længere den er trykket ind, jo strammere sidder hættten på. Undgå at trykke hættten for hårdt ind, da den vil være svær at fjerne og dette forkorter ventilens levetid.

DAGLIGE RUTINER: Kontroller dagligt ventilens funktion og inspicer den for skader. Udskift ventilen med en ny i tilfælde af skader eller defekt. **SKIL ALDRIG MEMBRANEN AD!**

Rengør ventilen dagligt. Brug fingrene eller **PLASTIK PINCET** til at fjerne/genindsætte filteret. Brug aldrig skarpe genstande. Ventilholderen og hættten skal lufttørre efter de er blevet rengjort i lunken vand og med en mild, parfumefri sæbeopløsning. Skyl ventilhættten fra alle sider for at fjerne sæberester. Andre vaske- og opløsningsmidler må ikke benyttes. Undersøg altid funktionaliteten af ventilen efter rengøring og sikr at luftvejene er frie. Filteret skal smides ud, må ikke vaskes og genbruges!

Ventilen bør altid bruges med **FILTER (4)** (varenummer 740, sælges separat). **FILTERET BØR UDSKIFTES HVER DAG**, eller oftere hvis nødvendigt. Sikr at filteret sidder sikkert og jævnt i bunden af ventilen, tilpasset hele vejen rundt, og at luftstrømmingen gennem filteret ikke spærres af sekret eller andre stoffer.

ET VARMESKJOLD/BRUSEHÆTTE (6) (varenummer 730, sælges separat) bør benyttes som anbefalet med inhalationsåbningen vendt nedad.

EN ADAPTOR (2) (varenummer 707/708, sælges separat) er kun nødvendig som forbindelse til en talekanyle uden en ISO 15 connector (konisk).

SUPPLERENDE ILT kan tilsættes via Ø5.5 mm studs på ventil kammeret. Den hvide porthætte (7) (varenummer 710 og 710R) skal påsættes taleventilen og kun fjernes, når der skal tilføres ilt.

TALEVENTILEN skal udskiftes med en ny efter 29 dages brug, eller oftere hvis nødvendigt. Ventilen må ikke benyttes, mens patienten sover eller hvis patienten ikke er ved bevidsthed. Brug en SPIRO FUGTER (varenummer 702, sælges separat) i disse tilfælde.

Taleventilen skal fjernes ved medicininalation.

RESISTENS IMOD FLOW for SPIRO Taleventil er < 2 cm H₂O*, og med varmeskjold/bruschætte monteret < 3 cm H₂O*.

Alle produkter skal opbevares i tørre og mørke omgivelser ved normal rumtemperatur.

OPBEVARINGSPERIODE FOR SPIRO-PRODUKTER: se venligst årstal og måned ved "TIMEGLASSYMBOL" på vareetiketten. Produkterne skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser.

KONTAKT ALTID DIN LÆGE, LEVERANDØR ELLER PRODUCENT HVIS DU HAR SPØRGSMÅL.

* ved 30 liter pr. minut