

### Tilsigtet formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

### Indikationer

Produktet er beregnet til personer med stomi.

### Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

### Information

Stomipose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

### Særlige opbevaringskrav

Produktet skal opbevares vandret.

Bør ikke udsættes for sollys.


### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

## Anvendelse

### Forberedelse

1

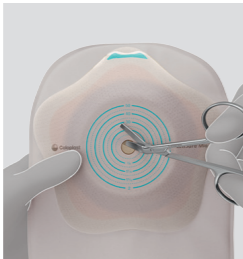

Følg klippeguiden på klæberen, og klip et hul med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form.

Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form.


Stomiens størrelse og facon kan ændre sig, så det anbefales, at du måler den, når den er størst. Det vil ofte være, når du sidder ned.

2




For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

3

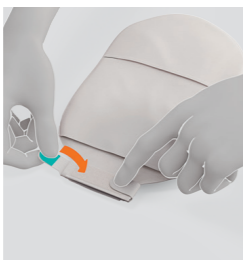

Læg posen på et fladt underlag med klæberen nedad.

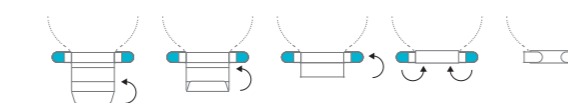

Luk udløbet ved at folde udløbets bund op tre gange, så strimlen af Velcro® bliver synlig.

Fold de to tapper indad, så Velcro® fastgøres.


### Påsætning

4




Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren og tør, inden klæberen påsættes.

5

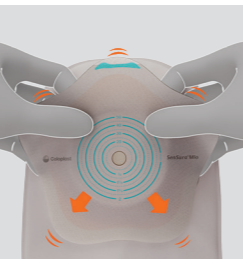


Flip de 5 runde hjørner for at gøre klæberen klar til påsætning.

6

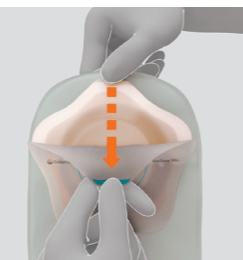


Træk beskyttelsesfilmen af den klæbende overflade.

7

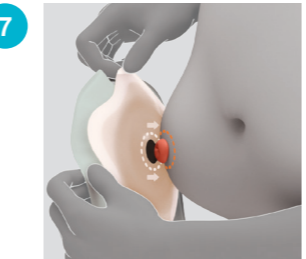


Hold klæberen med de runde hjørner foldet tilbage. Før den midterste del af klæberen over stomien.

8

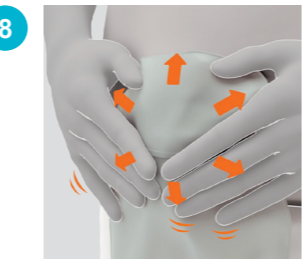


Tryk forsigtigt den midterste del på huden. Flip derefter de 5 runde hjørner ned over det omkringliggende område.

9

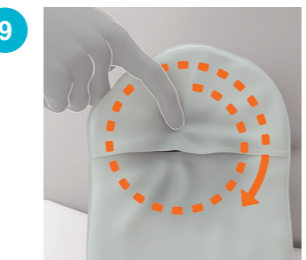


Brug pegefingeren til at finde den bløde stabilitetsring, der omkredser stomien. Tryk forsigtigt på klæberen mellem ringen og stomien samt direkte på stabilitetsringen for at sikre, at den midterste del af klæberen danner en sikker vedhæftning.

10

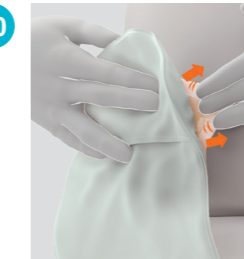

Tryk fra midten af klæberen og udad i flere retninger for at sikre god klæbeevne mellem klæberen og huden omkring stomien.

### Filtermærkat

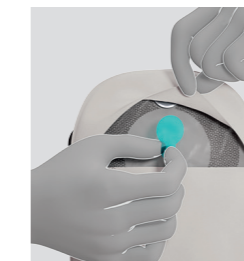

Hvis du ønsker midlertidigt af forhindre, at der slipper luft ud af posen, kan et af de medfølgende filterklistermærker sættes over filteret for at lukke det. Hvis filteret lukkes i længere perioder, vil posen blive oppustet, så det må kun gøres i en kort periode.




Brugsanvisningen findes også på video

For at se instruktionsvideoen kan du enten scanne QR-koden eller gå til


<http://www.coloplast.to/concave2>

## Produktegenskaber

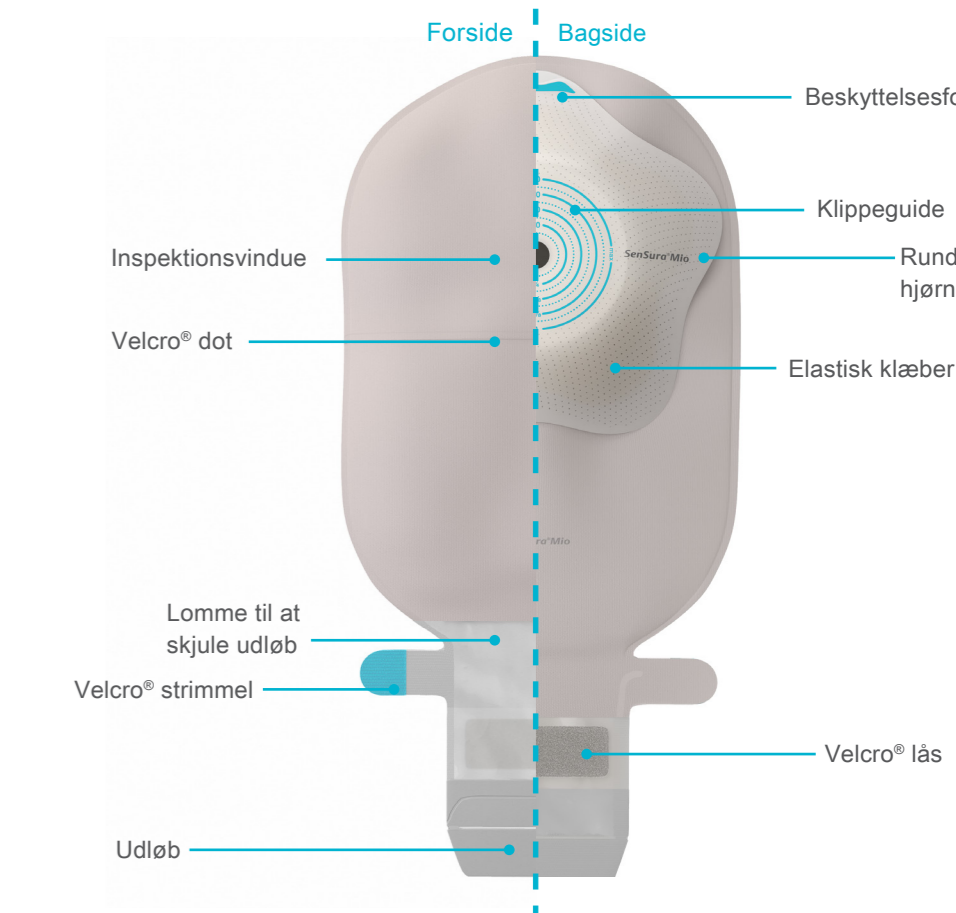

## Tømning

11

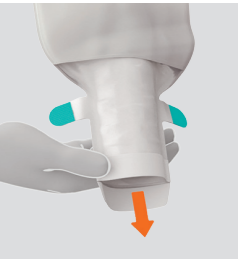

Luk op for udløbet og tøm posens indhold ud i toiletet efter behov.

12



Rengør udløbet, f.eks. med toiletpapir.

Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen, som vist i trin 3 og 4.

13



Udløbet kan gemmes ved enten at bruge Velcro® dot lige over udløbet ...

14



... eller ved at folde posen og fastgøre udløbet på Velcro® dot under inspektionsvinduet.

## Aftagning



Posen aftages langsomt og forsigtigt ved at trække i aftagningsøret på klæberen.

Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

## Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

## Håndtering af tilbagevendende problemer

?

### Klæberen klæber ikke ordentligt på huden

Sørg for at følge instruktionerne for påsætning i dette hæfte, og sørg for, at huden er helt ren og tør før påsætning. Det er vigtigt, at der er fuld kontakt mellem klæberen og hver fure i huden. Brug 30-60 sekunder på at trykke på klæberen under påsætning for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.

?

### Huden er rød og/eller irriteret under klæberen

Irriteret hud kan have mange årsager. Det kan skyldes lækage, fordi der ikke er brugt et rigtigt produkt eller en klippeskabelon i korrekt størrelse. Men det kan også skyldes utilstrækkelig rengøring eller hurtig fjernelse af klæberen, hvilket kan belaste huden. Hvis huden er rød, kan en klæberfjerner måske være en hjælp. Drøft problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.

?

### Lækage under klæberen

Lækage kan have mange årsager. Det kan skyldes, at kroppen eller stomien ændrer facon eller højde, eller at klæberen er påsat forkert. Overvej at gennemføre online værktøjet BodyCheck på [www.bodycheck.coloplast.dk](http://www.bodycheck.coloplast.dk) for at se, om din kroppsfacon har ændret sig. Hvis den har ændret sig, har du måske brug for et andet produkt, eller du kan måske have gavn af et tilbehørsprodukt. Det er vigtigt, at du drøfter problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.

## Forklaring på symboler

MD

Medicinsk udstyr

CE

Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr

REF

Katalognummer

⌚

Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

LOT

Batchkode

📅

Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

🏭

Fabrikant

📖

Se brugsanvisning

⊗

Må ikke genbruges

UDI

Indikerer en stregkode, som indeholder Unik udstyrsidentifikation

GTIN

(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer

☀️

Må ikke udsættes for sollys

↑↑

Denne side opad

♻️

Genanvendelig emballage

MR

MR-sikker

CE

Coloplast A/S  
Holtevej 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Brugsanvisning

23325209 Version 2

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast

A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-01-08

Velcro® tilhører Velcro Industries B.V.



# SenSura® Mio Concave

## Concave stomipose

### 1-dels tømbar ileostomipose



## Brugsanvisning