

SenSura[®] Mio Concave

Concave urostomipose

1-dels urostomipose



Brugsanvisning

Tilsigtet formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

Indikationer

Produktet er beregnet til personer med stomi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Urostomi flerkammerpose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Særlige opbevaringskrav


Produktet skal opbevares vandret.

Bør ikke udsættes for sollys.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.


Produktegenskaber

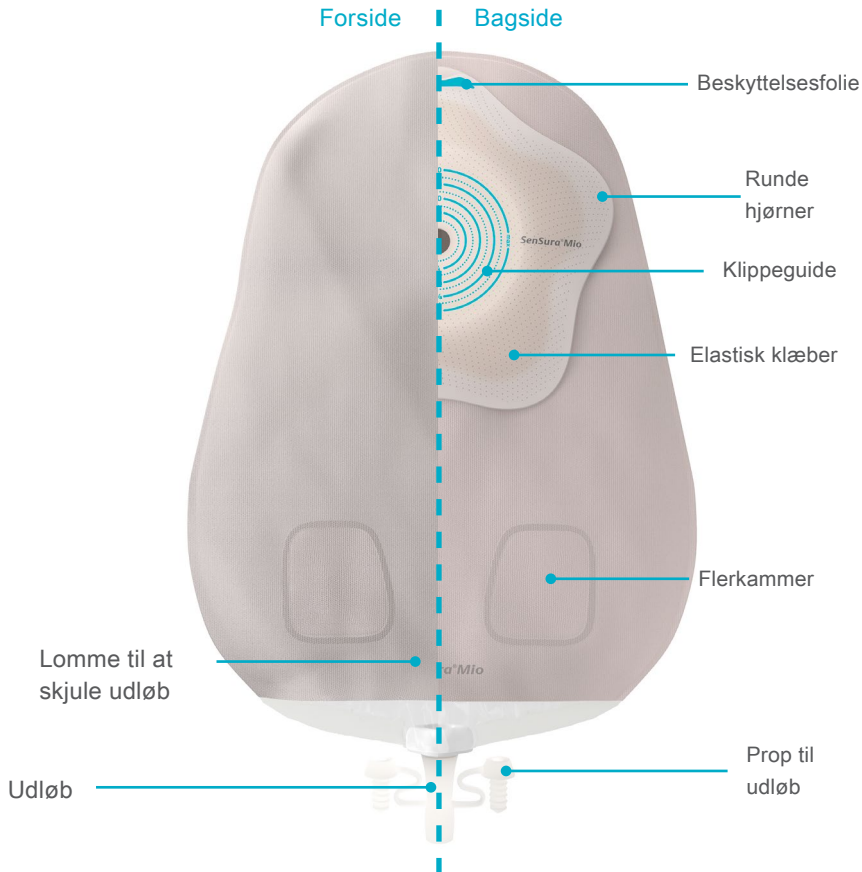

Anvendelse

Forberedelse

1

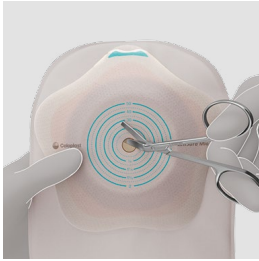

Følg klippeguiden på klæberen, og klip et hul med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form.


Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form.

Stomiens størrelse og facon kan ændre sig, så det anbefales, at du måler den, når den er størst. Det vil ofte være, når du sidder ned.

For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

Sæt proppen i udløbet i bunden af posen.


2

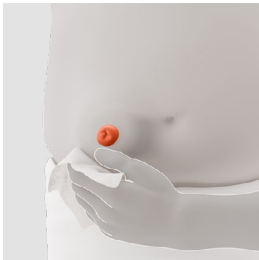

Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren og tør, inden klæberen påsættes.


Påsætning

3

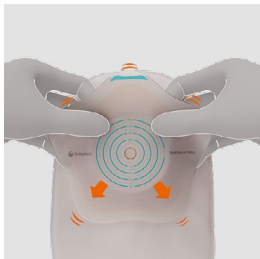


Flip de 5 runde hjørner for at gøre klæberen klar til påsætning.

4

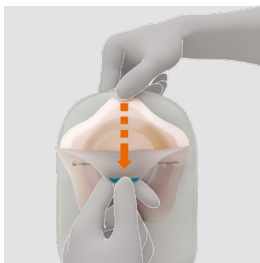

Træk beskyttelsesfilmen af den klæbende overflade.

5

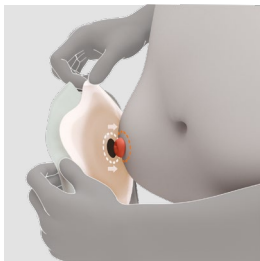

Hold klæberen med de runde hjørner foldet tilbage. Før den midterste del af klæberen over stomien.
Tryk forsigtigt den midterste del på huden.
Flip derefter de 5 runde hjørner ned over det omkringliggende område.

6




Tryk klæberen godt fast på huden fra midten og ud.

7



Brug pegefingeren til at finde den bløde stabilitetsring, der omkredser stomien. Tryk forsigtigt på klæberen mellem ringen og stomien samt direkte på stabilitetsringen for at sikre, at den midterste del af klæberen danner en sikker vedhæftning.

8

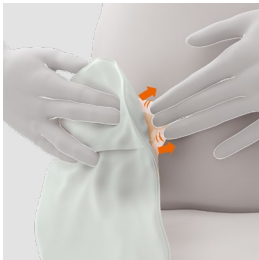

Tryk fra midten af klæberen og udad i flere retninger for at sikre god klæbeevne mellem klæberen og huden omkring stomien.

Tømning

9



Hold udløbets prop/ende opad, klem om udløbets yderste del, og træk proppen ud. Vend derefter udløbet nedad, slip grebet om udløbet, og tøm derefter posen. Når posen er tømt, skal proppen skubbes i bund, så udløbet lukkes effektivt.

10



Udløbet kan skjules i lommen foran, så stomiposen er mere komfortabel og diskret.
(Gælder kun for poser med forside af gråt tekstil).

Aftagning



Posen aftages langsomt og forsigtigt ved at trække i aftagningsøret på klæberen.

Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.

Håndtering af tilbagevendende problemer



Klæberen klæber ikke ordentligt på huden

Sørg for at følge instruktionerne for påsætning i dette hæfte, og sørg for, at huden er helt ren og tør før påsætning. Det er vigtigt, at der er fuld kontakt mellem klæberen og hver fure i huden. Brug 30-60 sekunder på at trykke på klæberen under påsætning for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.



Huden er rød og/eller irriteret under klæberen

Irriteret hud kan have mange årsager. Det kan skyldes lækage, fordi der ikke er brugt et rigtigt produkt eller en klippeskabelon i korrekt størrelse. Men det kan også skyldes utilstrækkelig rengøring eller hurtig fjernelse af klæberen, hvilket kan belaste huden. Hvis huden er rød, kan en klæberfjerner måske være en hjælp. Drøft problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.



Lækage under klæberen

Lækage kan have mange årsager. Det kan skyldes, at kroppen eller stomien ændrer facon eller højde, eller at klæberen er påsat forkert. Overvej at gennemføre online værktøjet BodyCheck på www.bodycheck.coloplast.dk for at se, om din kropsfacon har ændret sig. Hvis den har ændret sig, har du måske brug for et andet produkt, eller du kan måske have gavn af et tilbehørsprodukt. Det er vigtigt, at du drøfter problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.



Vanskeligt at fjerne beskyttelsesfolien

Det er vigtigt at vende alle 5 runde hjørner, før folien trækkes af. Se vejledning i aftagningsteknik trin 3 og 4 i denne folder, eller se instruktionsvideoen på <http://www.coloplast.to/concave3>



Der er ofte rynker eller folder i klæberen efter påsætning

Sørg for, at de 5 runde hjørner påsættes fast og jævnt over eventuelle buler ved at udglatte alle folder og trykke de runde hjørner godt fast mod huden. Hvis du stadig har problemer, kan du overveje at tage online-selvvurderingstesten BodyCheck på www.bodycheck.coloplast.dk for at se, om der anbefales et andet produkt til din kroppsfacon.



Brugsanvisningen findes også på video

For at se instruktionsvideoen kan du enten scanne QR-koden eller gå til

<http://www.coloplast.to/concave3>

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker



Coloplast A/S
Høtvedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugsanvisning

23325191 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast

A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-12-09



Coloplast