


SenSura[®] Mio Concave

Click basisplade Concave

2-dels

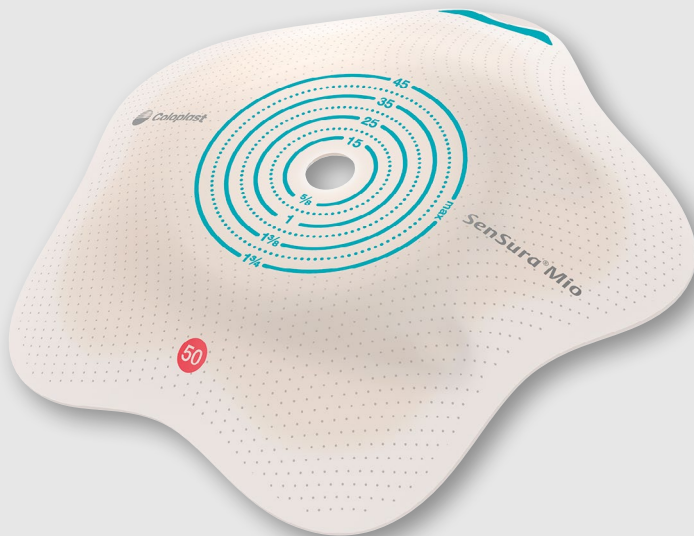

Brugsanvisning

Tilsigtet formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

Indikationer

Produktet er beregnet til personer med stomi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Basisplade til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Særlige opbevaringskrav


Produktet skal opbevares vandret.

Bør ikke udsættes for sollys.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.


Produktegenskaber

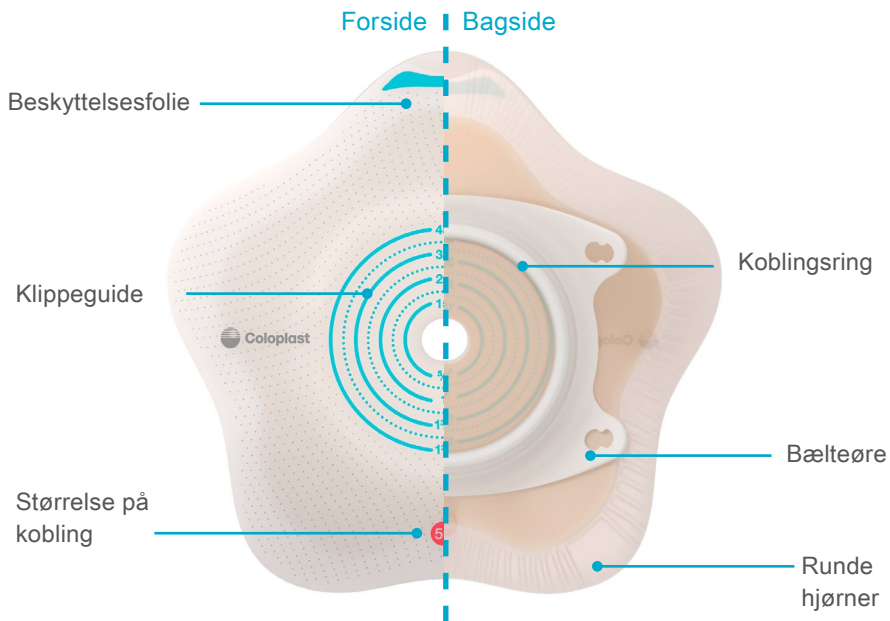

Anvendelse

Forberedelse

1

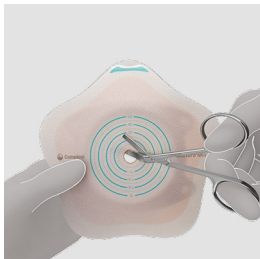


Følg klippeguiden på basispladen, og klip et hul med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form.

Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form.

Stomiens størrelse og facon kan ændre sig, så det anbefales, at du måler den, når den er størst. Det vil ofte være, når du sidder ned.

For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.


2

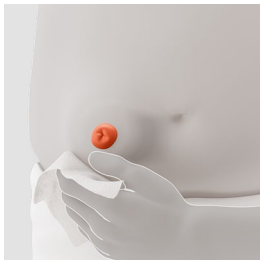

Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt ren og tør, inden klæberen påsættes.


Påsætning

3

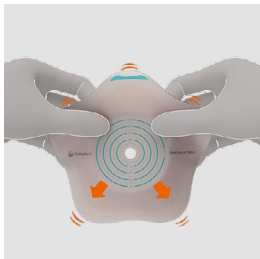


Flip alle 5 runde hjørner for at gøre basispladen klar til påsætning.

4

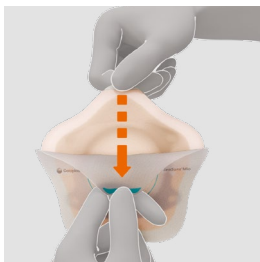

Fjern beskyttelsesfolien fra basispladen.


5

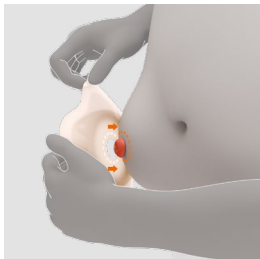

Hold basispladen med de runde hjørner foldet tilbage. Før den midterste del af basispladen over stomien.


Tryk forsigtigt den midterste del fast på huden. Bøj derefter de 5 runde hjørner ned over det omkringliggende område.

6

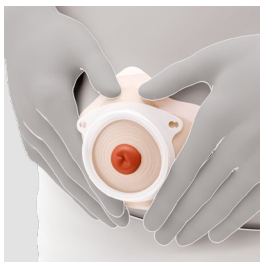


Tryk basispladen godt fast på huden fra midten og ud.

7

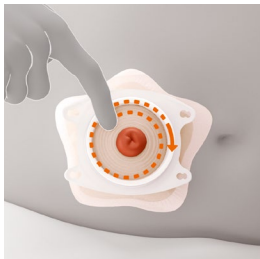


Placér pegefingeren tæt på stomien. Tryk forsigtigt på basispladen mellem stomien og konklingsringen for at sikre, at den midterste del af basispladen danner en sikker vedhæftning med huden.

8

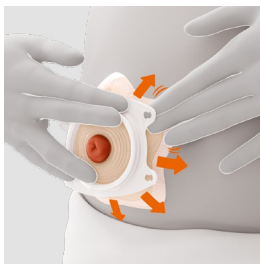

Tryk fra midten af basispladen og udad i flere retninger for at sikre god klæbeevne mellem basispladen og huden omkring stomien.

9

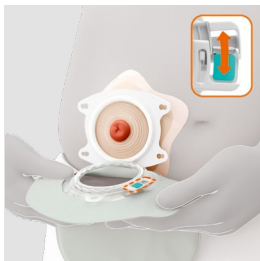

Sørg for, at basispladen er ren, før du påsætter posen. Kontrollér, at låseringen er åben.


Placér den nederste del af posens kobling på den nederste del af basispladens kobling.

10




Posen påsættes ved at trykke koblingen fast på basispladen.
Start nedefra og før fingrene opad.

11

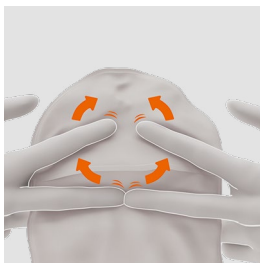

Før pegefingrene opad, og tryk forsigtigt på toppen af koblingen, **indtil du mærker, at posen er korrekt anbragt** på basispladen.

12

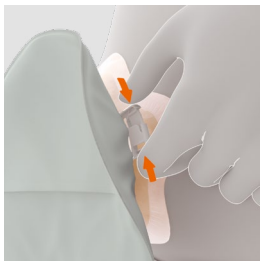


Luk låseringen ved at trykke låsen sammen. Posen er sikkert låst fast til basispladen, når du hører et "klik".

Træk forsigtigt i posen for at kontrollere, at den er korrekt fastgjort.


Aftagning

1

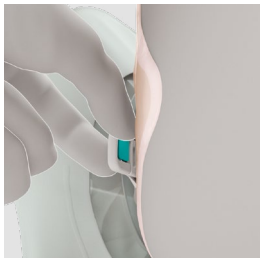


Tryk med spidsen af en finger på den lille turkise tap, der vender ind mod maven for at åbne låseringen.

2

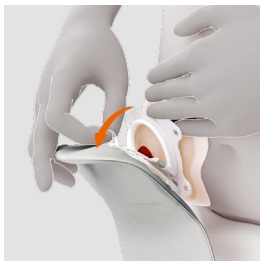

Hold fast i posens aftagningsøre, og fjern posen **vedforsigtigt at trække** posen væk fra basispladen.

3

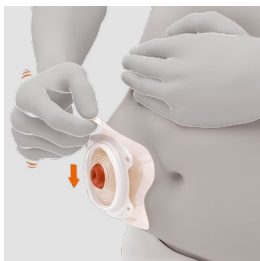

Basispladen aftages langsomt ved at trække i aftagningsøret og fjerne den forsigtigt fra huden.

Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.

Flere oplysninger om posen

Du kan læse flere oplysninger om, hvordan du bruger posen, i brugsanvisningen i æsken med poser.



Brugsanvisningen findes også på video

For at se instruktionsvideoen kan du enten scanne QR-koden eller gå til

<http://www.coloplast.to/concave4>

Håndtering af tilbagevendende problemer



Basispladen klæber ikke ordentligt på huden

Sørg for at følge instruktionerne for påsætning i dette hæfte, og sørg for, at huden er helt ren og tør før påsætning. Det er vigtigt, at der er fuld kontakt mellem basispladen og hver fure i huden. Brug 30-60 sekunder på at trykke på basispladen under påsætning for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.



Huden er rød og/eller irriteret under klæberen

Irriteret hud kan have mange årsager. Det kan skyldes lækage, fordi der ikke er brugt et rigtigt produkt eller en klippeskabelon i korrekt størrelse. Men det kan også skyldes utilstrækkelig rengøring eller hurtigt fjernelse af klæberen, hvilket kan belaste huden. Hvis huden er rød, kan en klæberfjerner måske være en hjælp. Drøft problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.



Lækage under basispladen

Lækage kan have mange årsager. Det kan skyldes, at kroppen eller stomien ændrer facon eller højde, eller at basispladen er påsat forkert. Overvej at gennemføre online værktøjet BodyCheck på www.bodycheck.coloplast.dk for at se, om din kropsfacon har ændret sig. Hvis den har ændret sig, har du måske brug for et andet produkt, eller du kan måske have gavn af et tilbehørsprodukt. Drøft problemet med stomisygeplejersken så hurtigt som muligt.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker



Coloplast A/S
Holteådam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugsanvisning

23325249 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast

A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-11-30

