

127,0 mm

**droplet**<sup>®</sup>  
pen needles

810/08/2018

**Brugsanvisning**

**Sterile penkanyler til engangsbrug**

- Beregnet til brug sammen med en penindsprøjtningssætning til subkutan indsprøjtning af insulin.
1. Fjern forsigtigen fra penkanylen.
  2. Skub penkanylen lige på pennen, og drej, indtil den sidder stramt. Skub ikke penkanylen i en vinkel. Fjern derefter den ydre beskyttelseshætte, og læg den til side.
  3. Du skal bruge den senere til at tage penkanylen af penindsprøjtningssætningen.
  4. Fjern ad alle penindsprøjtningssætninger i løbet af din behandling. Brug aldrig to sætninger af penindsprøjtningssætninger til brug for at forhindre, at doseringen er forøket pga. luft i pattenen eller en tilstoppet kanyyle. Hvis du ikke kan se nogen insulin efter flere forsøg, skal du påsætte en ny penkanyle.
  5. Indstil din insulin-dosis.
  6. Udfør indsprøjtningen som instrueret af din læge. Pas på ikke at begyde nalen. Indsprøjt langsomt. Træk ikke kanylen ud umiddelbart efter indsprøjtningen. Du må ikke trække kanylen ud for hurtigt, da det kan resultere i blod i kanylen, hvilket kan belyde, at kanylen lugtes eller lækker af.
  7. Påsæt den ydre beskyttelseshætte igen (kun ved sekundindsprøjtning).
  8. Fjern penkanylen fra penindsprøjtningssætningen efter hver indsprøjtning for at forhindre luft i at trænge ind i pattenen og insulin i at sive ud.

**Advarsler!**

Undgå infektioner, demburg eller ød ikke penkanyler. Brug ikke penkanyler, hvis den individuelle emballage er beskadiget, hvis forsigtigen mangler, eller hvis kanylen ser ud til at være beskadiget. Undgå udløstede nåle. Brug aldrig andre persons penkanyler. Penkanyler er uddiskrettede, beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes sikkert i henhold til de lokale bestemmelser. Holdes på afstand af børn, der ikke er under opsyn af voksne.

**STERILE** 

**Forsigtighed**

Placer dig med din læge eller sygeplejerske for at få hjælp til valg af den passende kanylængde og indsprøjtningsteknik. Følg brugsanvisningen af pens. Se brugsanvisningen i produktet af insulin/penindsprøjtningssætningen for specifikke oplysninger om dosering og brug af insulin. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte vores kundeservice på [customer.service@insulin.com](mailto:customer.service@insulin.com) eller på vores hjemmeside [www.lifescan.com/products/pen-needles](http://www.lifescan.com/products/pen-needles). Få den detaljerede liste over penindsprøjtningssætninger på [www.lifescan.com/products/pen-needles](http://www.lifescan.com/products/pen-needles).

**CE** 0344

63,5 mm