

 TRACOE medical GmbH  
Reichelsheimer Straße 1 / 3, 55268 Nieder-Olm / Germany  
Tel.: +49 6136 9169-0, Fax: +49 6136 9169-200  
info@tracoe.com, www.tracoe.com



## Brugsanvisning til TRACOE® tube clean rensningstamponer lille (REF 935) og rensningstamponer stor (REF 936)

### Anvendelsesområde Tracheostomikanyler

TRACOE® tube clean rensningstamponer er specielt udviklet til rensning af tracheostomikanyler. De består af en lang bøjelig kunststofstang, som har en blød polyuretansvamp i den ene ende. Derved kan kanylerne gøres rene på en særlig skånsom måde uden, at der dannes fnug, og man undgår at kunststofkanylerne ridses.

Tamponerne „**lille**“ skal bruges ved kanyler med størrelse 7 og mindre, tamponerne „**stor**“ ved kanyler med størrelse 8 og større. Disse skal især bruges ved kanyler, som består af blødt kunststof, som f.eks. alle TRACOE® tracheostomikanyler og TRACOE® larynx grid og stoma buttons.

TRACOE® tube clean rensningstamponer skal bruges i forbindelse med TRACOE® tube clean rensningspulver (REF 932) eller TRACOE® tube clean rensningskoncentrat (REF 933).

Skorper og større urenheder skal renses forinden ved hjælp af TRACOE® tube clean rensningsbørster, med uldhoved (REF 938) eller lige og ekstra-lang (REF 940).

**BEMÆRK:** Rensningstamponerne skal af hygiejniske grunde smides ud efter første brug.

TRACOE® tube clean rensningstamponer må under ingen omstændigheder anvendes til rensning af tracheostomikanyler, som stadig befinder sig i trakea (in situ).

Pakkens indhold/VE: 50 stykker  
Længde i alt: 150 mm  
Svampens diameter:  
rensningstampon lille (REF 935): 4,5 mm  
rensningstampon stor (REF 936): 7 x 9 mm

**Tilbagesendelse**

Tilbagesendelse af brugte produkter accepteres kun, når forsendelsen er vedlagt et udfyldt dekontaminations-certifikat. Denne formular fås direkte hos TRACOE medical eller på internetadressen: [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com).

**Almindelige forretnings- og leveringsbetingelser**

Køb, levering og returnering af alle TRACOE® produkter sker udelukkende på grundlag af de til enhver tid gældende almindelige forretnings- og leveringsbetingelser, der kan fås hos TRACOE medical GmbH eller på internetadressen: [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com).