



Vitrex Sterilance Press II

Steril sikkerhedslancet


Brugsanvisning

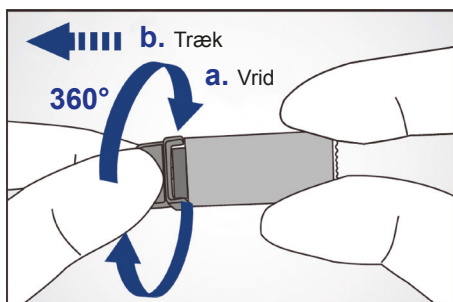

1. Drej forsigtigt beskytteshætten, indtil den er adskilt fra sikkerhedslancetten.

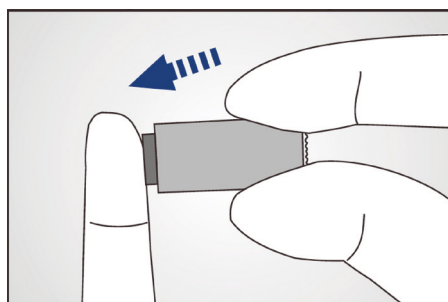

2. Placér lancetten mod det sted hvor prøven skal tages fra. Fjern ikke sikkerhedslancetten, før der har lydt et hørbart klik.

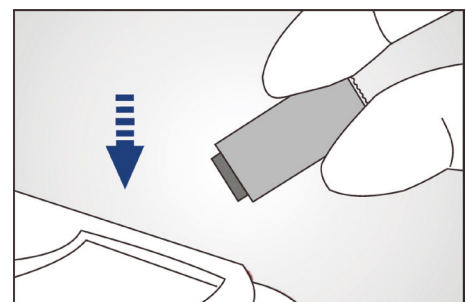

3. Kassér den brugte sikkerhedslancet i en passende beholder til skarpe genstande.

PRODUKT:

Vitrex sikkerhedslancetter bruges til at udføre hudpunkteringer til indsamling af mikropøver af kapillærblod.

- Til engangsbrug.
- Sterilt.
- Sikkerhedslancet med trykaktivering.
- Ergonomisk design, skabt for at give et sikkert miljø.
- Let at bruge: 2-trins betjening og ingen ladning.
- Sikkerhed, efter brug trækkes lancetten ind i huset og dermed undgås ulykker.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Mål:

- Længde: 39,3 ± 1,5 mm
- Bredde: 14,8 ± 0,5 mm

Farvekode	Konfiguration	Penetrationsdybde	Artikelnr.	Applikation
Grøn	18G blad	1.8 mm	393213	Specielt til baby- og barselsenheder til hælprøve
Blå	21G nål	1.8 mm	397213	Som gul, men for øget blodgennemstrømning
Orange	21G nål	2.2 mm	395213	Hæmoglobin (blodbanker), kolesterol, blodtype, koagulation, blodgas og andre diagnostiske test
Pink	21G nål	2.8 mm	396213	Som orange, men tykkere hud på voksne personer
Gul	26G nål	1.8 mm	394213	Diabetes klinikker/hospitaler, afdelinger til overvågning af blodsukker
Lilla	28G nål	1.8 mm	398213	Lav blodgennemstrømning, mindre smerter
Turkis	30G nål	1.8 mm	399213	Lav blodgennemstrømning, mindre smerter

Holdbarhed: 5 år



Vitrex Medical a/s

Vasekaer 6-8 - DK 2730 Herlev

Phone +45 4494 7011

vitrex@vitrex.dk
www.vitrexmedical.com

